



23.3.2010

Muutoksia alihankintatutkimuksissa

C1-Esteraasin inhibiittori aktiivisuus –määrityksen näytemuoto vaihtuu plasmaksi

Uusi tutkimusnimike on **P -C1InhBk (6090)**, näytteeksi tarvitaan 2 ml plasmaa sitraattiputkeen otettuna. Plasma erotetaan heti, säilytys ja lähetys pakastettuna. **Viitearvot ovat 70 – 130 %**. Vanha nimike S -C1InhBk (4098) poistuu käytöstä.

Kromograniini A:n viitearvot ja tutkimusnumero muuttuvat

Kromograniini A:n (**fP-CgA; 6041**) viitearvo muuttuu määrityksessä käytettävän vasta-aineen vaihtuessa. Uusi **viitearvo on alle 6.0 nmol/l**.

Keskimääräinen tulostaso pysyy ennallaan. Yksittäisten potilaiden kohdalla tulostaso voi kuitenkin muuttua vasta-aineiden erilaisesta kyvystä tunnistaa epitooppeja Kromograniini A -molekyylissä. Alihankintalaboratorio säilyttää 8.12.2009 – 11.1.2010 välisenä aikana analysoidut potilasnäytteet puolen vuoden ajan pakastettuna. Pyydetessä he määrittävät edellisen näytteen samanaikaisesti uuden näytteen kanssa. Mikäli edellinen näyte on otettu em. päivämäärää aikaisemmin, suositellaan seurantanäytteen ottamista lyhyemmällä aikavälillä mahdollisen tulostasomuutoksen toteutukseksi.

Näytteenotto- ja lähetysohjeet pysyvät ennallaan. Näyte 1 ml hepariiniplasmaa. Paasto suositeltava, ei välttämätön. Happosalpaalääkityksessä tulee pitää 1 - 2 viikon tauko ennen näytteenottoa. Kylmänäytteenotto ja nopea erotus kylmässä. Plasma on pakastettava kolmen tunnin sisällä. Vanha tutkimusnumero fP-CgA (50279) poistuu käytöstä.

Jarkko Romppanen
Kl. kemian vastuualuejohtaja
apulaisylilääkäri

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat,
Kuopion aluelaboratorio: KYSin osastot ja poliklinikat,
PSSHHP terveyskeskukset ja sairaalat
Internet, intranet

C:\Users\LESKINENJ\Documents\nettiinlaitetut\islab_tiedotteet_2010\8-2010, P -C1InhBk (6090) fP-CgA (6041).doc

Postiosoite	Käyntiosoite	Puhelin:	Telefax:	E-mail:
PL 1700	KYS, Puijon sairaala	(017) 178 711	(017) 173200	etunimi.sukunimi@islab.fi
70211 KUOPIO	Rakennus 1A, 2. krs			
	Puijonlaaksontie 2			
	70210 KUOPIO			