



12.9.2008

Virtsan perustutkimusten (U-Kemseu, U-Solut ja U-Diffi) säilyvyys ja lähettäminen

Hajautettuina pyydetty tai muuten Islab-laboratorioihin lähetettävät virtsanäytteet otetaan ensisijaisesti Becton Dickinsonin vihreäkorkkisiin 10/4 ml:n C&S-vakuumiputkiin (Greinerin säilöntäaineputket eivät sovellu automaattiseen solulaskentaan). Pyydetessä lähetämme C&S-putkia näytteenottotarvikkeineen Islab-laboratorioihin lähetettäviä näytteitä varten.

ISLAB ei maksa hajautettuina pyydettyjen virtsan perustutkimusten suorittamisesta.

Liimaa viivakooditarrat putken yläreunaan pystysuoraan.

Säilöntäaineputkessa virtsanäyte säilyy huoneenlämmössä analysointikelpoisena 8 tuntia ja +4°C:ssa 24 tuntia.

Jos näytteenoton ja analysoinnin väli on yli kahdeksan tuntia, suositellaan kylmäkuljetusta (+4°C) laboratorioden välillä.

Virtsanäyte säilyy keltakorkkisessa säilöntäaineettomassa muoviputkessa analysointikelpoisena vain 4 tuntia jääkaappilämpötilassa.

Kari Punnonen
toimitusjohtaja

Sakari Eskelinen
sairaalakemisti
puh. 044 7178785

Jakelu intranet, internet, aluelaboratorioiden johtajat, PSSHPn alueen sairaalat ja Kuopion terveyskeskusten laboratoriot