



3.11.2015

Muutoksia seerumin Toxoplasma vasta-aineet (S -ToxoAb, 3907) - tutkimuksessa 5.11.2015

Tutkimus	S -Toxoplasma, vasta-aineet S -ToxoAb, 3907
Asia	Toxoplasma vasta-aineet (S -ToxoAb, 3907) tutkimuksen tekopaikka vaihtuu 5.11.2015. Tutkimus teetetään alihankintatutkimuksena alkaen. Tekopaikkavaihdoksen myötä tutkimuksen menetelmässä tapahtuu muutoksia. Muutoksen jälkeen S -ToxoAb -tutkimuksen osatutkimukset ovat Toxoplasma IgG-vasta-aineet (S -ToxoAbG), IgM-vasta-aineet (S -ToxoAbM), IgA-vasta-aineet (S -ToxoAbA) ja IgG-vasta-aineiden aviditeetti (S -ToxoAvi).
Menetelmä	Entsyymi-immunologinen menetelmä (EIA). Näytteestä tutkitaan ensin toxoplasma IgG- ja IgM-vasta-aineet. IgG- ja IgM-osatutkimusten tulosten perusteella määritetään tarvittaessa jatkotutkimuksena IgG-vasta-aineiden aviditeetti ja IgA-vasta-aineet. Eriyistapauksissa IgM- ja IgA-vasta-aineet tutkitaan myös herkemmällä, ns. ISAGA -menetelmällä.
Näyte	Seeruminäyte 1-2 ml, tarvittaessa pariseerumi 2 viikon (imeväisiällä vielä 2-3 kk:n) kuluttua.
Tulos valmiina	Viikon kuluessa.
Tulkinta	Tuloksista annetaan aina lausunto.

Ulla Kärkkäinen
osastonylilääkäri
ISLAB
Kuopion aluelaboratorio

Juha Kauppinen
sairaalabiologi
ISLAB
Kuopion aluelaboratorio

Jakelu
ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset
OA:MIKROB
Internet, intranet