

## NÄYTTEIDEN PAKKAAMINEN PUTKI POSTI KAPSELIIN, KYS (Putkipostin halkaisija 16 cm)



### Putkipostilla EI SAA lähettää

- B -TrVeADP (KL20990) B-Trombosyytit, ADP-vaste VerifyNow-laitteella
- B -TromTo (KL50080) B -Trombosyyttien toimintatutkimus PFA-laitteella
- Infektiovaarallisia näytteitä (esim. todettu tai epäilty influenssa-, COVID19-, SARS-, MERS-, lintuinfluenssa-, antrax- tms.)
- Anaerobiliemiputkia (TIO, FAB)
- Sienirikastusliemiputkia (SABORAUD)
- Muita kierrekorkillisia näytepurkkeja
- Viljelymaljoja
- Ruiskussa olevia punktionesteitä
- Verivalmisteita hoitoyksiköstä toiseen tai palautuksina verikeskukseen. Ne on kuljetettava itse tai esim. lähetin toimesta. Ainoastaan verikeskus saa lähettää verivalmisteita. Kts. erillinen ohje verivalmisteiden lähetyksestä.
- Ainutkertaisia näytteitä lähettäjän harkinnan mukaan

Näytteitä lähetetään vain sinisissä kapseleissa. Muita kapseleita ei saa käyttää näytteiden lähetykseen. Näytteet tai näyteastiapaketit asetetaan huolellisesti kuplamuovitaskuun. Pussi kääritään pitkittäissuunnassa löyhästi rullalle taskun läpän avulla (kapselin pituinen kääro) ja asetetaan kapseliin.



Alla on tarkempia erityisohjeita näyteastioiden pakkaamisesta ennen kuplamuovitaskuun laittamista. Kaikki muut näyteastiat voidaan laittaa samaan kuplamuovitaskuun sellaisenaan. Älä laita kapseliin tyhjiä kuplamuovipusseja, pusseja tai geelejä. Näyteastiat eivät tarvitse lisäpehmustetta.

<p>Avonäytteenä vakuumiputkeen otetut verinäytteet tai punktionesteet</p>	<p>Varmista korkin kiinnipysyminen teipillä, kääri astia selluun ja laita salpapussiin (esim. Minigrip). Sulje salpapussi huolellisesti.</p>	
<p>Verikaasuruiskut</p>	<p>Pakkaa ruiskut jääkaappikylmään kylmägeelitaskuun (tilaus keskusvarastosta koodi: 431934, GEELITASKU 180X100X20MM KIRJEKUORIMALLI).</p>	

Lähetysosoite 24/7: 1200 ISLAB näytteiden vastaanotto



Kuvailutiedot

	NÄYTTEIDEN PAKKAAMINEN PUTKIPOSTIKAPSELIIN, KYS
OID-koodi	1.2.246.10.21261066.100.15.2015.5.3.4
Laatija(t)	Arja Tossavainen, Minna Hakkarainen, Outi Perola, Anne Mitrunen, Ulla Ristonmaa, Anna Oksaharju
Tarkastaja(t)	Jarkko Romppanen
Hyväksyjä	Ulla Dunder
Osaamisalue	OA:PREANA
Sijaintipaikka	ohjehallinta (word), internet (pdf)
Työpiste(et)	Puijon lajittelut
Asiasanat	OA:PREANA, preanalytiikka, näytteenotto, lajittelu, OA:VERKES, verikeskus, Puijo, putkiposti, KYS, pakkaaminen, kuplamuovi, geelitasku, putkipostikapseli, näyteastia
Korvaa ohjeen	Samannimisen 24.7.2019
Kommentit	Ohje on pdf-muodossa internetohjeena ISLABin internetissä. Internetohjeesta on otettu kuvailutiedot pois ja OID-koodi on laitettu ohjeen alaviitteeseen. Aineistohallinnassa oleva WORD-tiedosto on versio, jota päivitetään. WORD versiossa muutokset harmaalla. Lisäksi laatijoita, tarkastaja sekä hyväksyjä on päivitetty kesäajasta ja lomista johtuen.