



## Vacuette turvasiipineulan käyttöohje

Ohjeessa on kuvattu turvasiipineulan mekaaninen käyttö. Muutoin näytteet otetaan ohjeen Verinäytteenotto laskimosta mukaisesti. Tunnista potilas juuri ennen näytteenottoa potilaan vierellä kysymällä hänen nimensä ja henkilötunnuksensa ja vertaa tietoa etukäteen tulostetun/kirjoitetun tarran tietoihin ja varmistu, että ne ovat samat.

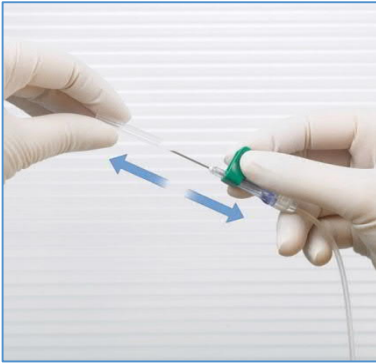


1 Poista neulansuojus

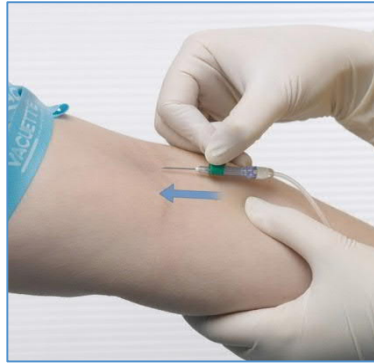


2 Suorita laskimopunktio



3 Työnnä putki ohjaimeen

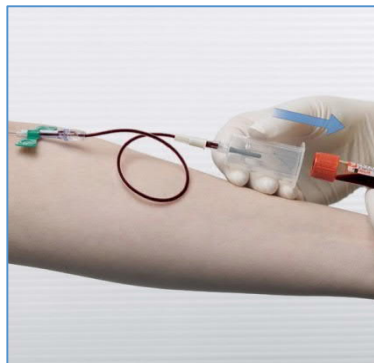


4 Poista viimeinen putki

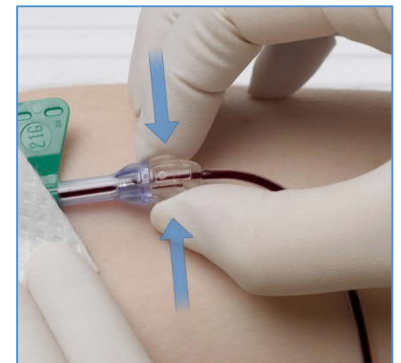

5 Aktivoi turvamekanismi painamalla painikkeista ja vetämällä kirkasta osaa itseesi kohti



6 Napsahdus osoittaa aktivoinnin tapahtuneen

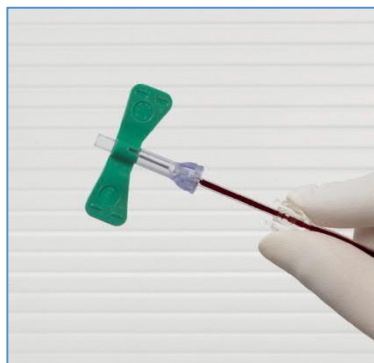

7 Käytetty turvasiipineula, jonka turvamekanismi on aktivoitu



8 Hävitä turvasiipineula asianmukaisesti