

Vacuette turvasiipineulan käyttöohje

Ohjeessa on kuvattu turvasiipineulan mekaaninen käyttö (turvamekanismin aktivointi).




1 Poista neulansuojus




2 Suorita
laskimopunktio




3 Työnnä putki
ohjaimeen

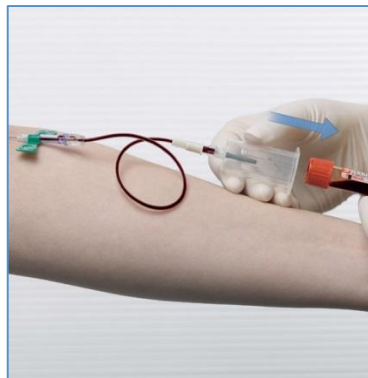


4 Poista viimeinen putki

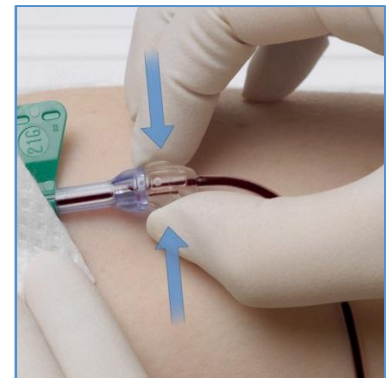


5 Aktivoi turvamekanismi
(painamalla läpinäkyvistä
ja karhennetuista
muovipainikkeista
vaaleansinisen runko-
osan alapuolelta, samalla
vetäen kirkasta osaa
itseesi päin)

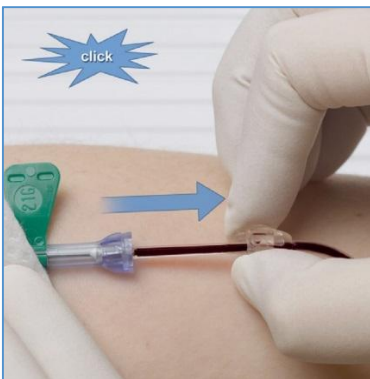

6 Napsahdus osoittaa
aktivoinnin
tapahtuneen

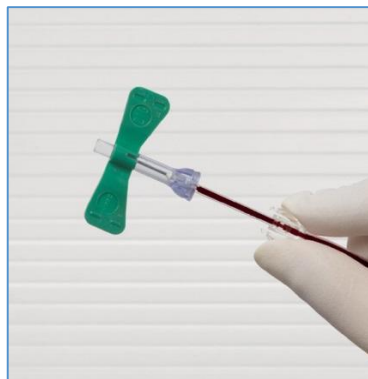

7 Käytetty turvasiipi-
neula, jonka turvame-
kanismi on aktivoitu

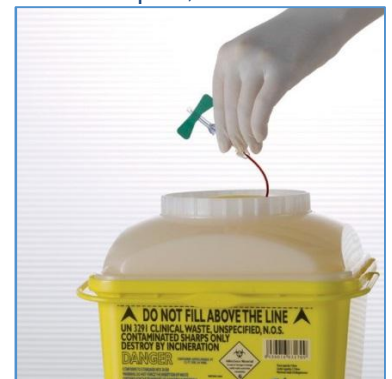

8 Hävitä turvasiipineula
asianmukaisesti