



Trombosyyttivalmisteiden säilytyspussi vaihtuu

Kokoverestä valmistettujen trombosyyttivalmisteiden säilytyspussi vaihtuu 16.11.2018 alkaen. Pussien vaihdossa on arviolta 1 viikon siirtymävaihe, jonka aikana käytössä on sekä nykyisiä että uusia säilytyspusseja.

Muutoksen kuvaus

Veripalvelun säilytyspussin toimittaja vaihtuu ja uuden säilytyspussin valmistaja on Haemonetics.

Muutos koskee kaikkia muita trombosyyttivalmisteita paitsi afereesilla kerättyjä valmisteita.

Samassa yhteydessä Veripalvelu muuttaa etiketin asettelua siten, että se tullaan kiinnittämään pussiin eri tavoin kuin aiemmin, jolloin verensiirtoa suoritettaessa etiketin tekstit ovat luettavissa oikein päin ja valmisteen poolinumero jää näkyviin. Etiketin tiedot tulevat säilymään ennallaan.

Trombosyyttien säilytyspussin verensiirtoportti eli ns. lehdykkä avataan nykyistä trombosyyttipussia vastaavalla tavalla. Pussin valmistaja on laatinut ohjeen siirtolaitteen yhdistämisestä ja se on luettavissa Veripalvelun nettisivuilla (<https://www.veripalvelu.fi/terveydenhuollon-ammattilaiset/verensiirrot/ohjeet>).

Lisätietoja:

Veripalvelun Tilauskeskus puh. 029 300 1001

asiakaspalvelu@veripalvelu.fi

Kari Punnonen
toimitusjohtaja
johtava ylilääkäri


Meri Vuolle
erikoislääkäri, verikeskuksen vastuulääkäri

Jakelu

KYSin osastot ja poliklinikat
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset
ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
OA:VERKES
Internet, intranet

HAEMONETICS PLATELET BAG ACCESS

Spike entry port with twist-off cap

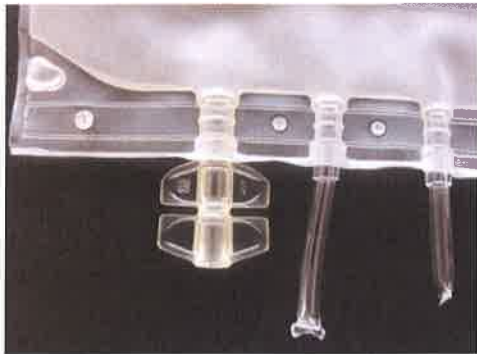

1. Lay platelet bag on horizontal surface



2. Firmly grip wings of port and cap



3. Using firm twisting motion, tear off cap



4. Discard cap



5. Carefully align spike with opened port and insert using a quarter turn to pierce septum




6. If necessary use a second quarter turn until septum is pierced



Correctly inserted spike

Do not insert spike too far into bag. Tip of spike must not be visible beyond base of port.

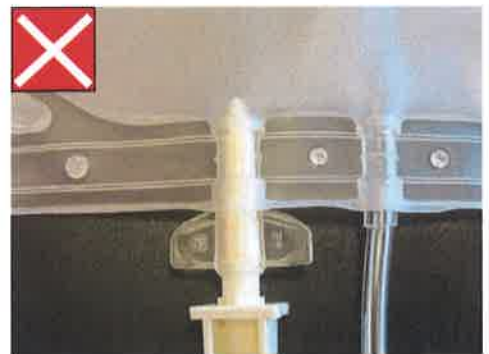

Spike inserted too far into bag

Information contained herein for distribution outside of the USA only.

© 2013 Haemonetics Corporation. Haemonetics and Haemonetics The Blood Management Company are trademarks or registered trademarks of Haemonetics Corporation in the USA, other countries, or both. All rights reserved. TRN-QRG-100042-IE(AA).

HAEMONETICS S.A. • Signy Centre • Rue des Fléchères 6 • PO Box 262 • 1274 Signy Centre • Switzerland