



31.8.2020

Vuorokausivirtsan adrenaliini + noradrenaliini sekä dopamiini tutkimukset siirtyvät alihankintatutkimuksiksi 7.9.2020 alkaen

Tutkimukset

[dU-Adrenaliini + noradrenaliini, dU-AdrNor, 1019](#)

[dU-Dopamiini, dU-Dopam, 1264](#)

Aihe

Vuorokausivirtsan adrenaliini + noradrenaliinitutkimus sekä dopamiinitutkimus siirtyvät alihankintatutkimuksiksi 7.9.2020. Tutkimusten viitearvot sekä säilytys- ja lähetysohjeet muuttuvat.

Viitearvot

Ikä	dU-Adr (µmol/vrk)	dU-Noradr (µmol/vrk)	dU-Dopam (µmol/vrk)
0-1 v	alle 0.014	alle 0.06	alle 0.6
1-2 v	alle 0.019	alle 0.10	alle 0.9
2-4 v	alle 0.033	alle 0.17	alle 1.7
4-7 v	alle 0.055	alle 0.27	alle 2.6
7-10 v	alle 0.055	alle 0.38	alle 2.6
10-15 v	alle 0.109	alle 0.47	alle 2.6
yli 15 v	alle 0.15	alle 0.60	alle 3.3

Näyte

Vuorokausivirtsasta kerätään astiaan, johon on lisätty 10 ml suolahappoa (6M HCl). Keräysastia on säilytettävä kylmässä koko keräyksen ajan. Mitatusta ja hyvin sekoitetusta vuorokausi-virtsasta lähetetään 10 ml analysoitavaksi. Läheteeseen merkitään vuorokausivirtsan määrä.

Säilytys ja lähetys

Säilytys 2-3 vrk jääkaapissa. Lähetys huoneenlämmössä, jos perillä vuorokauden kuluessa. Pidempiaikainen säilytys -20C asteessa ja lähetys pakastettuna.

Alihankintalaboratorio VITA laboratoriot lähettää näytteet edelleen Saksaan näytteet analysoivaan laboratorioon (Labor Dr. Kramer & Kollegen). Alihankintalaboratorioiden akkreditoinnin tilanne löytyy niiden verkkosivuilta.

Päivi Ylikangas
johtava ylilääkäri

Jarkko Romppanen
osastonylilääkäri

Anu Oikku
sairaalakemisti

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset

Siun soten sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän sairaalat ja terveyskeskukset

Essote Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä sairaalat ja terveyskeskukset

Itä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset

OA:KERANA, OA:PREANA

Internet, intranet