

16.7.2021

Uudet mikroputket vauvojen kapillaarinäytteenottoon käyttöön KYSillä

Islabissa on kilpailutuksen myötä vaihtuneet vauvojen kapillaarinäytteenottoon tarkoitetut mikroveriputket. Uudet putket ovat Sarstedt Oy:n Microvette mikroputkia.


Käytössä on entiseen tapaan EDTA, seerumi, seerumigeeli, Li-hepariini ja Li-hepariinigeeli -putket. Huomaa, että Li-hepariini- ja Li-hepariinigeeliputkessa on saman värinen korkki.



Kaikissa putkissa on optimaalisen 500 µl:n täyttöviivan (ylempi viiva) lisäksi minimitäyttöviiva (alempi viiva). Pyri täyttämään putki ylempään optimaaliseen täyttöviivaan, mutta näytettä on oltava vähintään alempaan viivaan asti, jotta veren ja lisäaineen suhde on oikea ja näyte on analysointikelpoinen. Ylempi täyttöviiva ei saa ylittyä.

Näytteenotto putkeen

- Kierrä putken korkki auki. Voit halutessasi laittaa sen kiinni putken pohjaan näytteenoton ajaksi. Ole erittäin huolellinen siinä, että korkit eivät sekoitu.
- Valuta näytopisara putkeen putken reunaa pitkin. **Kierrä putkea noin 90° jokaisen pisaran välillä**, jotta pisara ottaa mukaansa putken reunalla olevaa lisäainetta.
- Täytä putki ylempään täyttöviivaan, minimissään kuitenkin alempaan.
- Sulje putki painamalla korkki kiinni "click" -asentoon (kuulet "click"-äänen).
- Näytteenoton jälkeen sekoita putkea kääntelemällä sitä rauhallisesti noin 4 kertaa.

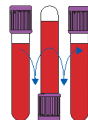

Yksi sekoituskerta:

Näytteenottojärjestys ei ole muuttunut. Katso ohjekirjasta se, mihin putkeen näyte tulee ottaa. Ennen näytteenottoa tulosta potilastarra ja tunnista potilas tuosta tarrasta henkilötunnuksen perusteella potilaan vierellä juuri ennen näytteenottoa. Merkitse putket potilastarralla potilaan vierellä. Varmista, että tarrassa on oikea näytteenottoaika. Toimita näytteet laboratorioon mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen.

Päivitämme putkikartan ja näytteenotto-ohjeen internet-sivuillamme mahdollisimman pian.

Hoitoyksikössä tulisi huolehtia, että jokainen näytteitä ottava on saanut perehdytyksen näytteenottoon ja uuden putken käyttöön.

Katariina Vuorenmaa
aluelaboratorion johtaja

Helka Torvinen
osastonhoitaja
puh. 044 717 8745

Jakelu

KYS osastot: KY2407, KY2403, KY2406, KY4361, KY2303, KY2304, KY3401, KY3402, KY3901
Islab intranet ja internet