

## NÄYTTEIDEN PAKKAAMINEN PUTKIPOSTI KAPSELIIN, KYS (Putkipostin halkaisija 16 cm)


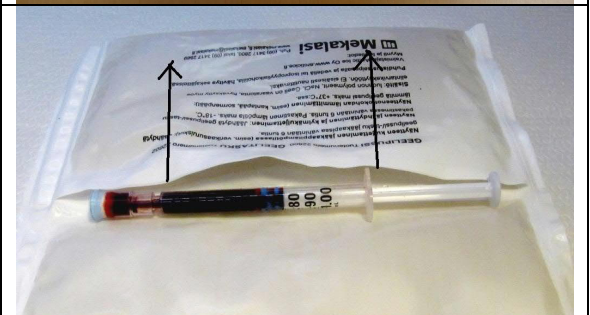
### Putkipostilla EI SAA lähettää

- B -TrVeADP (KL20990) B-Trombosyytit, ADP-vaste VerifyNow-laitteella
- B -TromTo (KL50080) B -Trombosyyttien toimintatutkimus PFA-laitteella
- Infektiovaarallisia näytteitä (esim. todettu tai epäilty influenssa-, COVID19-, SARS-, MERS-, lintuinfluenssa-, antrax- tms.)
- Anaerobiliemiputkia (TIO, FAB)
- Portagem anaerobiampulleja
- Sienirikastusliemiputkia (SABORAUD)
- Muita kierrekorkillisia näytepurkkeja
- Viljelymaljoja
- Ruiskussa olevia punktionesteitä
- Verivalmisteita hoitoyksiköstä toiseen tai palautuksina verikeskukseen. Ne on kuljetettava itse tai esim. lähetin toimesta. Ainoastaan verikeskus saa lähettää verivalmisteita. Kts. erillinen ohje verivalmisteiden lähetyksestä.
- Ainutkertaisia näytteitä lähettäjän harkinnan mukaan

Näytteitä lähetetään vain sinisissä kapseleissa. Muita kapseleita ei saa käyttää näytteiden lähetykseen. Näytteet tai näyteastiapaketit asetetaan huolellisesti kuplamuovitaskuun. Pussi kääretään pitkittäissuunnassa löyhästi rullalle taskun läpän avulla (kapselin pituinen kääri) ja asetetaan kapseliin.



Alla on tarkempia erityisohjeita näyteastioiden pakkaamisesta ennen kuplamuovitaskuun laittamista. Kaikki muut näyteastiat voidaan laittaa samaan kuplamuovitaskuun sellaisenaan. Älä laita kapseliin tyhjiä kuplamuovipusseja, pusseja tai geelejä. Näyteastiat eivät tarvitse lisäpehmustetta.

Avonäytteenä vakuumputkeen otetut verinäytteet tai punktionesteet	Varmista korkin kiinnipysyminen teipillä, kääri astia selluun ja laita salpapussiin (esim. Minigrip). Sulje salpapussi huolellisesti.	
Verikaasuruiskut	Pakkaa ruiskut jääkaappikylmään kylmägeelitaskuun (tilaus keskusvarastosta koodi: 431934, GEELITASKU 180X100X20MM KIRJEKUORIMALLI).	

Lähetysosoite 24/7: 1200 ISLAB näytteiden vastaanotto