



25.8.2021

Tekopaikka- ja näytteenoton ajoituksen muutos lymfosyyttien stimulaatiokokeet (B -Ly-S, 4337) -tutkimuksessa 1.9.2021 alkaen

Tutkimus

[B -Lymfosyyttien stimulaatiokokeet](#)

[B -Ly-S, 4337](#)

Asia

Lymfosyyttien stimulaatiokokeet -tutkimuksen alihankintatekopaikka vaihtuu HUSLABiin 1.9.2021. Näytteen tulee olla HUSLABissa viimeistään keskiviikkona klo 14. Koska näytteen säilyvyysaika on 27 h, tulee näyte ottaa tiistaina klo 11 - 13 välisenä aikana. Näytteen tulee olla ISLABin laboratorion alihankintatutkimusten lähetyspisteessä klo 14 mennessä. ISLABin laboratorio toimittaa näytteen keskiviikkoamuksi HUSLABiin.

Menetelmä

Virtausytometrinen määrittäminen (FLOW-cytometric Assay for Specific Cell-mediated immune-response in Activated whole blood, FASCIA). Käytettävät mitogeenit ovat PHA (fytohemagglutiini, T-solumitogeeni) ja ConA (konkanavaliini A, T-solumitogeeni).

Näyte

Hepariiniverinäyte (5-10 ml, Li-hepariiniputki). Lapsilla tutkimus voidaan tehdä 0,5-1 ml:n näytteestä. Näytteen säilyvyysaika on 27 h. Kuljetus huoneenlämpötilassa.

Tuure Kinnunen
ylilääkäri
kliininen mikrobiologia

Ulla Kärkkäinen
osastonylilääkäri
kliininen mikrobiologia

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset
Pohjois-Savon tartuntataudeista vastaavat lääkärit
Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sairaalat ja terveyskeskukset
Essote - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sairaalat ja terveyskeskukset
Itä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset
OA: MIKROB
Internet, intranet