



8.11.2021

## Lapsiveden lamellaarikappaleiden näyteastia ja viitearvot muuttuvat 9.11.2021 alkaen

### Tutkimus

Lapsiveden lamellaarikappaleet

Am-Lamel (20092)

### Aihe

Islabin keskuslaboratorioiden verenkuvalaitteet vaihtuvat marras-joulukuun aikana Advia-analysaattoreista Sysmex XN -laitteisiin. Laittevaihdoksen seurauksena lapsiveden lamellaarikappaleiden näyteastia ja viitearvot muuttuvat 9.11.2021 alkaen. Lisäksi lapsivesinäytteen analysointi keskitetään laitevaihdoksien ajaksi Puijon laboratorioon Kuopioon.

### Uusi näyteastia

5 ml lasiputki (2 kpl / tutkimus)

### Näytteenotto

10 ml punktiona otettua lapsivettä siirretään kahteen kylmään lasiputkeen (5 ml / putki). Näyte kuljetetaan kylmäkuljetuksena laboratorioon. **Soita ennen näytteenottoa** laboratorioon (Puijo: puh. 044-7178722, Mikkeli: puh. 044-7178927 ja Joensuu: puh. 044-7178866) ja sovi näyteastioiden toimittamisesta näytteenottopaikkaan.

### Menetelmä

Automaattinen elektroninen solulaskenta (Sysmex XN -analysaattori)

### Viitearvot

Epäkypsät keuhkot	alle 10 x 10E9/l
Siirtymävaihe	10 – 29 x 10E9/l
Kypsät keuhkot	yli 29 x 10E9/l

Päivi Ylikangas	Pentti Mäntymaa	Jonna Koponen
Johtava ylilääkäri	Osastonylilääkäri	Sairaalakemisti

### Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat ja osastonhoitajat

KYS:n osastot ja poliklinikat

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkärit

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sairaalat ja terveyskeskukset

Essote - Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän sairaalat ja terveyskeskukset

Itä-Savon sairaanhoitopiirin sairaalat ja terveyskeskukset

OA:HEMAUT

Internet, intranet