

Kohdunkaulasyövän seulonta: HPV näytteenotto

22.11.2021


Kohdunkaulasyövän seulonta: HPV näytteenotto Pohjois-Savo

Näytteenottoväline APTIMA® Cervical Specimen Collection and Transport Kit



Näytteenottovälineiden tilaukset ja jakelu paikallisten ISLABin toimipisteiden kautta.

Näytteenotto

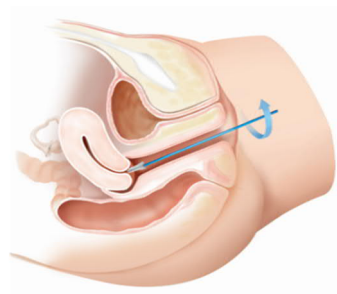

1. Ota ensin PAPA-näyte.
2. Avaa APTIMA-näytteenottovälinepakkaus. Näyte otetaan pakkauksen [sinivartisella näytteenottoharjalla](#). (Puhdistustikkua ei tässä tarvita, koska näytealue on jo puhdistettu ennen PAPA-näytteenottoa.)
3. Pyöritä näytteenottovälineen harjaspäätä kohdunkaulakanavassa myötäpäivään kolme täyttä kierrosta riittävän näytteen saamiseksi. Varo koskemasta harjalla emättimen limakalvoon.
4. Avaa näytteenkuljetusputken korkki. Laita näyteharja kuljetusputkeen.

Kohdunkaulasyövän seulonta: HPV näytteenotto

22.11.2021



5. Pidä näyteharjaa varresta peukaloetusormiotteella. Pyöritä näyteharjaa näytteenkuljetusputken nesteessä kolmesti, jotta solut irtoavat kuljetusputken nesteeseen.



6. Laita näyteharja jätteisiin. Harjaa EI SAA jättää näytteenkuljetusputkeen.



7. Sulje näytteenkuljetusputken korkki tiiviisti.
8. Kiinnitä pyyntötarra näytteenkuljetusputkeen (viivakoodi pitkittäin).

Toimitusosoite

Pohjois-Savo: KYS Patologian laboratorio

Näytteiden säilytys ja kuljetus

Näytteiden kuljetus ja säilytys huoneenlämmössä.

Yhteyshenkilö

ISLAB/Sairaalamikrobiologi Anna Oksaharju p. 044 717 8769 anna.oksaharju(at)islab.fi