


7.6.2023

Liite 1.

Hemoglobiinin mittaaminen HemoCue-mittarilla, pikaohje

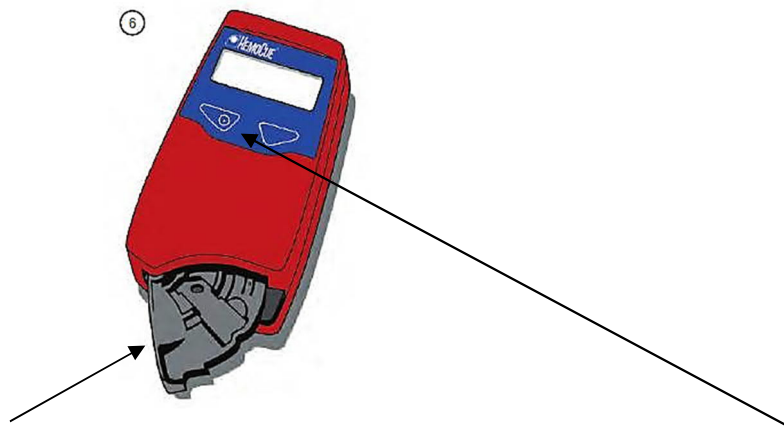

1. Avaa kyvettipidike laitteen etuosasta ja käynnistä laite painamalla virtanappia. Laite on valmis mittaukseen, kun näytössä on kolme vilkkuvaa viivaa.
2. Varmista, että potilaan käsi on lämmin.
3. Puhdista näytteenotto-kohta alkoholilla ja anna kuivua.
4. Ota näyte keskisormen tai nimettömän ulkoreunasta (paras verenkierto, kivuttomin kohta).
5. Pyyhi pois 2–3 ensimmäistä veripisaraa ja käytä mittaukseen 3. tai 4. veripisara.
6. Kun pisara on riittävän suuri, pistä kyvetin kärki ylhäältä päin, suorassa asennossa veripisaraan ja anna kyvetin täyttyä kerralla tarpeeksi pitkään, ettei ilmakuplia tulisi kyvetin sisään. Jos kyveti jää vajaaksi, ota näyte uuteen kyvettiin.
7. Pyyhkäise ylimääräinen veri varovasti pois kyvetin ulkopinnoilta. Varmista, että näytettä ei imeydy pois kyvetin avoimesta päästä.
8. Tarkista, että täytetyssä kyvetissä ei ole ilmakuplia. Pienet kuplat kyvetin ulkolaidoilla eivät vaikuta tulokseen. Hb-pitoisuus on mitattava 10 min kuluessa näytteenotosta.
9. Aseta kyveti kyvettipidikkeeseen ja työnnä pidike mittausasentoon.
10. Lue tulos näytöstä 15–60 sekunnin kuluttua. Tulos säilyy näytössä niin kauan kuin kyvettipidike on mittausasennossa. Poista käytetty kyveti kyvettipidikkeestä.
11. Sammuta laite painamalla vasemmanpuoleista painiketta muutama sekunti.