

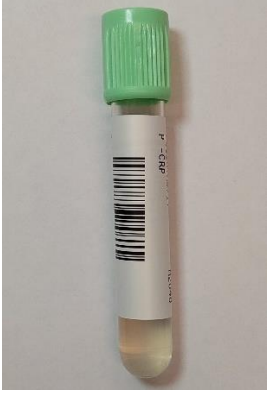
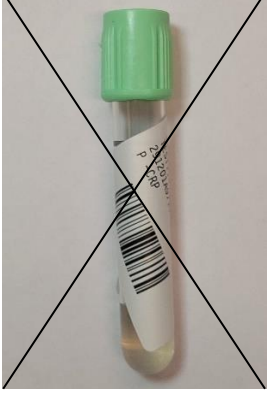

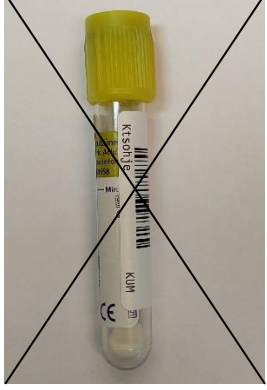


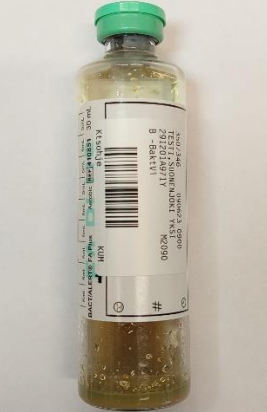



28.6.2023

TARRAN LIIMAAMINEN NÄYTEASTIAAN

		<p>OHJEET</p>
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Yksi tarra/putki (ei päällekkäin) ✓ Liimaa tarra: <ul style="list-style-type: none"> - pitkittäin kohtisuoraan - n.0,5cm korkin alapuolelle - tasaisesti siten, ettei jää ilmakuplia eikä tarra jää ryttyyn
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Jätä "ikkuna" näyteputkeen, josta voidaan arvioida näytteen laatu (huomioi etiketilliset putket) - Älä tee merkintöjä viivakoodiin
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ La-putkessa tarra liimataan mahdollisimman ylös ✓ Liimaa tarra tasaisesti putken ympärille
		<ul style="list-style-type: none"> ✓ Veriviljelypulloissa liimaa tarra pitkittäin kohtisuoraan henkilötiedoille varatulle alueelle - Älä peitä tarralla pullossa olevia viivakoodeja