


8.1.2024

Raskaudenajan streptokokkibakteerin seulontatutkimuksen (FI-StrBVi) näytteenotto-ohje

Näyte otetaan Copan M40 Transystem geeliputkeen. Samalla tikulla otetaan näyte ensin emättimestä ja sen jälkeen peräaukosta. Potilas voi ottaa näytteen myös itse saatuaan ensin ohjeistuksen terveydenhuollon ammattilaiselta. Ajoita näytteenotto siten, että näytteen voi toimittaa laboratorioon saman päivän aikana.

1. Ota näytteenottotikku ja geeliputki suojamuovin sisältä ja kiinnitä potilastarra geeliputken kylkeen pitkittäin.
2. Työnnä näytteenottotikku emättimen alaosaan kahden senttimetrin syvyydelle ja pyörittele näytteenottotikkua emättimessä 5–10 sekunnin ajan painaen tikkua emättimen limakalvoa vasten (**Kuva 1**).
3. Vedä näytteenottotikku pois emättimestä varoen koskettamasta tikulla mitään.
4. Työnnä näytteenottotikku peräaukkoon yhden senttimetrin syvyyteen ja pyörittele tikkua peräaukossa 5–10 sekunnin ajan painaen tikkua peräaukon limakalvoa vasten (**Kuva 2**).
5. Vedä näytteenottotikku pois peräaukosta varoen koskettamasta tikulla mitään.
6. Poista M40 Transystem geeliputken suojakorkki vetämällä. Korkki irtoaa kohdasta, joka on merkitty putkeen katkoviivalla (**Kuva 3**).
7. Työnnä näytteenottotikku suoraan geeliputken sisään siten, että näytetikku uppoaa syväälle geeliin, lähes putken pohjaan saakka ja näytteenottotikun punainen korkki painuu tiiviisti geeliputkea vasten (**Kuva 4**).

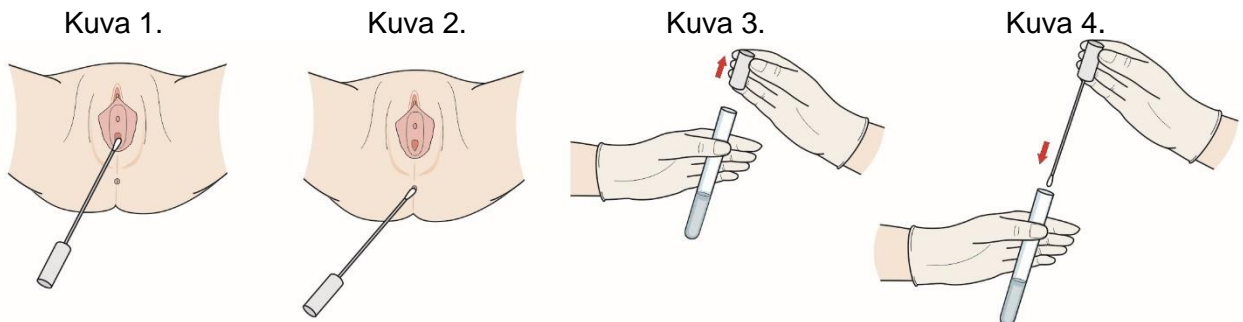

Uotila J, Lyytikäinen O. Vastasyntyneen varhaisen B-ryhmän streptokokki-infektion ehkäisy. Suom Lääkäril 2012;67:3768–72.

Tarkista vielä, että näyteputken tarrassa on potilaan nimi, henkilötunnus, näytteenottopvm ja tutkimuksen nimi (FI-StrBVi). Laita näyteputki nyörilliseen muovipussiin. Toimita näyte laboratorioon mahdollisimman pian huoneenlämmössä. Säilytä kuljetusta odottavaa näytettä jääkaapissa.