

Näytteiden pakkaaminen

31.1.2024

putkipostikapseliin, ohje KYSille

1.2.246.10.21261066.100.0.2024.2.19.1

**Näytteitä lähetetään vain sinisissä kapseleissa.** Putkipostin halkaisija 16 cm. Muita kapseleita ei saa käyttää näytteiden lähetykseen. **Näytteet tai näyteastiapaketit asetetaan huolellisesti kuplamuovitaskuun.** Pussi kääritään pitkittäissuunnassa löyhästi rullalle taskun läpän avulla (kapselin pituinen kääri) ja asetetaan kapseliin.



**Alla on tarkempia erityisohjeita** tiettyjen näyteastioiden pakkaamisesta ennen kuplamuovitaskuun laittamista. **Kaikki muut näyteastiat voidaan laittaa samaan kuplamuovitaskuun sellaisenaan. Älä laita kapseliin ylimääräisiä tyhjiä kuplamuovipusseja, pusseja tai geelejä.** Näyteastiat eivät tarvitse lisäpehmustetta.

**Lähetysosoite 24/7: 1200 ISLAB näytteiden vastaanotto**

<p><b>Avonäytteenä vakuumputkeen otetut verinäytteet tai punktionesteet</b></p>	<p>Varmista korkin kiinnipysyminen teipillä, kääri astia selluun ja laita Minigrip- tai vastaavaan, tiiviisti sulkeutuvaan pussiin. Sulje pussi huolellisesti.</p>	
<p><b>Verikaasuruiskut</b></p>	<p>Pakkaa ruiskut jääkaappikylmään kylmägeelitaskuun (tilaus keskusvarastosta koodi: 431934, GEELITASKU 180X100X20MM KIRJEKUORI-MALLI).</p>	

**Putkipostilla ei saa lähettää**

- B -TrVeADP (KL20990) B-Trombosyytit, ADP-vaste VerifyNow-laitteella
- B -TromTo (KL50080) B -Trombosyyttien toimintatutkimus PFA-laitteella
- B -NIPTtri (KL6373) B -Sikiön trisomiaututkimus äidin verinäytteestä BCT-putkia
- Tutkimushankkeiden erikoisputkia (mm. BCT- ja PaxGene -putket)
- Erityisen infektorisikin näytteitä (SARS-, MERS-, lintuinfluenssa-, antrax- tms. --> oma toimintaohje)
- Anaerobiliemiputkia (TIO, FAB)
- Portagerm anaerobiampulleja
- Sienirikastusliemiputkia (SABORAUD)
- Muita kierrekorkillisia näytepurkkeja
- Viljelymaljoja
- Ruiskussa olevia punktionesteitä
- Verivalmisteita hoitoyksiköstä toiseen tai palautuksina verikeskukseen. Ne on kuljetettava itse tai esim. lähetin toimesta. Ainoastaan verikeskus saa lähettää verivalmisteita. Kts. erillinen ohje verivalmisteiden lähetyksestä.
- Ainutkertaisia näytteitä lähettäjän harkinnan mukaan