








Putkikartta virtsanäytteet

6.2.2024

1.2.246.10.21261066.100.0.2024.2.21.1

Tutkimus	Putki/näyteastia	Huomioitavaa
<b>U -BaktVi (1155)</b> <b>U -UFSeul (sisältää</b> U -Solut + U -BaktVi tai U -KemSeul + U -BaktVi)	 4 ml ja 10 ml säilöntä- aineputki	Täyttö vähintään merkkiviivaan. Sekoitus 8-10 kertaa. Säily 24h huoneenlämmössä, U -UFSeul yön yli säilytys +4 °C.
<b>U -BaktEVi (1787)</b>	 4 ml säilöntäaineputki	Täyttö vähintään merkkiviivaan. Sekoitus 8-10 kertaa. Säily 24h huoneenlämmössä.
<b>U -KemSeul (1881)</b> <b>U -Solut (1940)</b>	 10 ml säilöntäaineputki (jos näytettä on vähän, voi nämä ottaa 4 ml säilöntäai- neputkeen)	Täyttö vähintään merkkiviivaan. Sekoitus 8-10 kertaa. Säily 24h huoneenlämmössä, yön yli säilytys +4 °C.
<b>U -AlbKre (4511), U -Amyl</b> (1080), <b>U -Prot (2519), U -</b> <b>Osmol (2444), U -hCG-O</b> (2124), <b>U -PneuAg (54205),</b> <b>U -LepnAg (4632)</b>	 4 ml säilöntäaineeton putki	Säilytys +4 °C, katso näytteen- otto- ja säilyvyysohjeet tutkimus- ohjekirjasta.
<b>cU- ja dU-alkuiset keräysvirt-</b> <b>sat</b>	 3000 ml keräysastia	Säilytys +4 °C, katso tutkimus- kohtaiset ohjeet tutkimusohjekir- jasta.
<b>U -CtGcNhO (4816)</b>	 Aptima® Urine Specimen Collection Kit (näytekulje- tusputkessa keltainen tarra)	Täyttö merkkiviivojen väliin. Säily 1 kk +2 - +30 °C.
<b>-TbVi (2812)</b>	 50 ml tehdaspuhdas purkki	Säilytys +4 °C, katso näytteen- otto- ja säilyvyysohjeet tutkimus- ohjekirjasta.