


Mittauksen suoritus CoaguChek XS INR-mittarilla, pikaohje

Jos avaat uuden liuskapurkin, laita paketissa oleva siru mittariin.

1. Mittari käynnistyy työntämällä testiliuska sisään.
2. Varmista, että näytössä vilkkuva koodisirun numero on sama kuin käyttämäsi testipurkin kyljessä oleva CODE-numero. Vahvasta painamalla M.
3. Tiimalasi osoittaa, että liuska lämpenee.
4. Kun näyttöön ilmestyy veripisaran ja testiliuskan kuva, laite on valmis mittaukseen.
5. Laite mittaa aikaa 180 s alkaen alaspäin, sinä aikana on näyte saatava liuskalle.
6. Tee sormenpäähän lansetilla riittävän suuri reikä (**pisto tehdään vasta tässä vaiheessa**).
7. Käytä ensimmäinen pisara.
8. Pidä liuskaa noin 45 asteen kulmassa pisaraan nähden ja kosketa liuskan näytealueen reunalla veripisaraa 15 s kuluessa pistämisestä. Pidä liuska kiinni ihossa koko ajan.

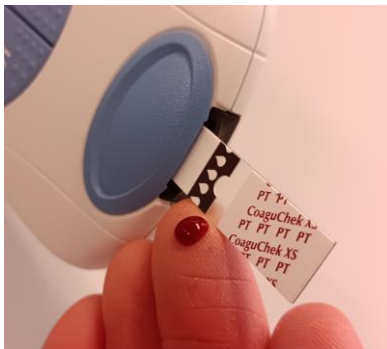

9. Laite piippaa, kun on saanut näytteen.
10. Tiimalasin kuva kertoo laitteen tekevän testiä.
11. Tulos tulee näyttöön.
12. Poista liuska.
13. Jos määrittäminen ei onnistu, aloita alusta ja tee uusi ihopisto.

CoaguChek XS INR pikaohje.docx

8.4.2024

1.2.246.10.21261066.100.22.2024.2.3.2

Kuvailutiedot

	Nimi
Laatija(t)	Ristonmaa Ulla
Tarkastaja(t)	Pakarinen Kukka
Hyväksyjä	Romppanen Jarkko
Osaamisalue	VIEANA
Sijaintipaikka	
Työpiste(et)	CoaguChek XS INR-mittarin sijaintipaikat
Asiasanat	CoaguChek; CoaguChek XS; INR; INR-HY; INR-O; VIEANA; Hyytymis- tutkimukset
Korvaa ohjeen	[Korvaa ohjeen]
Kommentit	[Kuvaus]