







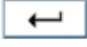

8.4.2024

## CRP:N ANALYSOINTI AFINION -LAITTEELLA, PIKAOHJE

- ✓ älä avaa kantta käsin, kansi avautuu painamalla näytössä 
  - ✓ testikasettien on oltava huoneenlämpöisiä (CRP-kasetit säilyvät 4 viikkoa huoneenlämmössä)
  - ✓ kirjaa paketin kylkeen tai kasettiin päivämäärä, jolloin kasetit on otettu huoneenlämpöön
1. Avaa testikasetin suojapussi juuri ennen käyttöä.
  2. Jos näyte otetaan sormenpäältä, pyyhi 1. pisara pois ja ota näyte 2. pisarasta.
  3. Näytteen analysointi pitää aloittaa 1 min kuluessa kapillaarin täyttämisestä.
  4. Varmista, että kapillaari on täyttynyt päähän asti, vältä ilmakuplien muodostumista. ÄLÄ PYYHI KAPILLAARIA!
  5. Laita kasetti laitteeseen minuutin kuluessa kapillaarin täyttämisestä.
  6. Avaa kasettipesän kansi painamalla 
  7. Aseta testikasetti laitteeseen ja sulje luukku.
  8. Syötä potilaan näytenumero, nimi tai henkilötunnus, vahvasta painamalla 
  9. Tulos tulee ruudulle testin valmistuttua (3½ min). Hyväksy tulos painamalla 
  10. Poista kasetti ja SULJE KANSI, kansi ei saa jäädä auki.
  11. Vastaa tulos välittömästi käytössä olevaan potilastietojärjestelmään. Tuloksesta on käytävä ilmi, että tulos on saatu pikamittarilla.

8.4.2024

## AFINION CRP-KONTROLLIEN ANALYSOINTI

- ✓ Afinion™ CRP-kontrollit (matala ja korkea) analysoidaan kerran viikossa
  - ✓ kontrollit analysoidaan aina kun kasettierän vaihtuu tai jos epäillään laitteen toimintaa tai kasettien toimivuutta
  - ✓ kontrolleja voi käyttää suoraan jääkaapista
  - ✓ kontrollit säilyvät avattuna 6 kk, kun korkki on suljettu tiiviisti, kirjaa avauspäivä pulloon
  - ✓ tulokset kirjataan kontrollilomakkeelle (liite 1)
1. CRP-kontrolleja voi käyttää suoraan jääkaapista.
  2. Sekoita CRP-kontrolli kääntelemällä pulloa 8-10 kertaa ylösalaisin.
  3. Avaa kansi painamalla sinistä kontrollikuvaketta 
  4. Avaa testikasettipussi ja ota kontrollipullostä näyte kapillaariin, varmista, että kapillaari on täyttynyt päähän asti ja siinä ei ole ilmakuplia. ÄLÄ PYYHI KAPILLAARIA.
  5. Aseta kasetti laitteeseen (viivakoodi vasemmalla) ja sulje kansi käsin.
  6. Paina  ja syötä kontrollin numero (1 tai 2), vahvista painamalla 
  7. Vahvista tulos painamalla näytöllä 
  8. SULJE KANSI, kantta ei saa jättää auki.
  9. Tarkista kontrollin tulos kontrollipaketin sisällä olevasta taulukosta:



- ✓ tulosten pitää olla suluissa ilmoitetun tavoitealueen sisällä
- ✓ kirjaa tulokset kontrollilomakkeelle (liite 1)