

Ohje hoitoyksiköille näytteiden pakkaamiseen ja
kuljettamiseen laboratorioon

24.1.2025

Ohje hoitoyksiköille näytteiden pakkaamiseen ja kuljettamiseen laboratorioon

Näytteenotto

- Katso tutkimuskohtaiset näytteenotto- ja säilyvyysohjeet ohjekirjasta www.islab.fi → [ISLAB Tutkimusohjekirja](#)
- ISLABin verkkosivuilta löytyy ohjeita näytteenottoon www.islab.fi → [Ammattilaisella](#) → [Näytteiden ottaminen](#)
- Verkkosivuilta löytyy mm. ohje [putkien näytteenottojärjestyksestä \(Putkikartta\)](#)

Näytteiden pakkaaminen

- Tarkasta tutkimuskohtaiset säilytys- ja kuljetuslämpötilat, sekä näytteiden säilyvyysajat www.islab.fi → [ISLAB Tutkimusohjekirja](#)
- Kuljeta näytteet huoneenlämmössä (+15 - +25°C), ellei näyte erikseen vaadi muuta kuljetuslämpötilaa esim. kylmäkuljetusta
- Kuljetuslämpötilan tulee olla ohjekirjan mukainen sääolosuhteista riippumatta. Käytä näytepakauksessa tarvittaessa lämpimällä/aurinkoisella säällä kylmägeeliä ja pakkasilla huoneenlämpöistä geeliä.
- Suosittelemme käyttämään näytteiden pakkauksessa lämpömittaria, josta lämpötilan voi tarkastaa.
- Näytteet tulee pakata siten, että näyteastiat eivät vahingoitu, rikkoudu tai altistu tärinälle.
- Näyteastiat tulee olla tiiviisti suljettuja.
- Laita näytteiden mukana tieto, jos näytteenotossa on ollut jotain poikkeavaa esim. näytteet otettu avotekniikalla.
- Jätä näytteiden mukana yhteystietosi (nimi ja puhelinnumero), jotta voidaan olla tarvittaessa yhteydessä.
- Laita näyteastiat nestetiiviiseen pakkaukseen (esim. salpapussi), jossa on sellainen määrä imeytysainetta/imukykyistä paperia, että se pystyy imemään itseensä näyteastioiden nestemäärän.
- Laita pakkaus sopivaan ulkopakkaukseen esim. kylmälaukkuun tai styrox-laatikkoon. Ulkopakkaus tulee merkitä merkinnällä "Biologinen aine, kategoria B + merkki UN3373.

Näytteiden kuljettaminen

- Toimita näytteet laboratorioon mahdollisimman nopeasti näytteenoton jälkeen.
- Joidenkin näytteiden säilyvyysaika on lyhyt tai näyte voi olla tarpeen kuljettaa jääkaappilämpötilassa. Esimerkkejä:
 - **B-La:** Jos näyte ei ehdi laboratorioon **kahden** tunnin kuluessa näytteenotosta, säilytää näyte jääkaappilämpötilassa esim. kylmägeelien välissä
 - **S-Ca-ion:** toimitettava **kahden** tunnin kuluessa laboratorioon
 - **Kalium (P-K):** toimitettava **kuuden** tunnin kuluessa laboratorioon
- Jätä näytteet laboratoriossa sovittuun paikkaan tai kuljetusfirman toimitettavaksi (kirjaa tällöin ulkopakkaukseen ISLAB laboratorion toimitusosoite).