

Päivämäärä

Clinitek Status, pikaohje potilasnäytteelle

1. Seisota näytettä noin 15 min huoneenlämmössä (+22 - +26 °C)


Määrittys tehdään huoneenlämpöisestä näytteestä

2. Sekoita näyte huolellisesti.
3. Ota testiliuska purkista puhtain ja kuivin sormin ja sulje purkki heti.

4. Paina **Strip Test**.
5. Syötä potilaalle
näytetunnus/henkilötunnus.



6. Paina **Start**, ja tee seuraavat toimenpiteet 8 sekunnin aikana:
 - kasta liuska virtsanäytteeseen
 - vedä liuskaa näyteastian reunaa pitkin, jotta ylimääräinen virtsa valuu pois
 - kuivaa liuskan reuna imupaperia vasten
 - aseta liuska testipöydälle

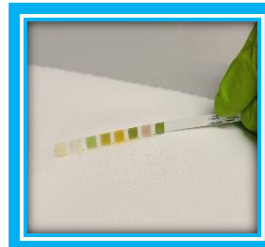

7. Kun määrittys on valmis, tulokset näkyvät testiruudulla.
8. Puhdista liuskaura kostealla liinalla.
9. Paina **Done** tai **Valmis**, kun haluat palata
aloitusvalikkoon.
10. Kirjaa tulokset potilastietojärjestelmään.

