



Raskaustesti virtsasta, pikaohje

1. Testikasetin ja virtsanäytteen on oltava huoneenlämpöisiä.
2. Testin tekoon tarvitaan kello.
3. Ota testikasetti ja pipetti foliopussista juuri ennen määrittystä.
4. Aseta kasetti tasaiselle alustalle ja sekoita näytettä.
5. Merkitse kasettiin näytetunnus aina, jos yhtä aikaa tehdään useampi määrittys.

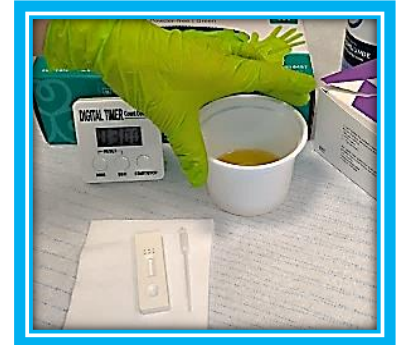

6. Vedä kertakäyttöpipettiin näytettä ja pipetoi pitäen pipettiä kohtisuorassa asennossa (vain tällöin tippojen koko oikea) 3 tippaa virtsaa kasetin näytekaivoon (S). Vältä ilmakuplien syntymistä näytekaivoon.

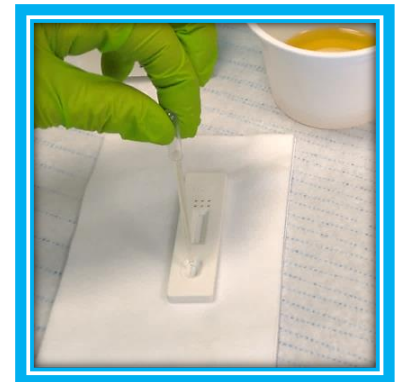

7. Odota punaisten viivojen ilmestymistä. Virtsanäytteen tulos luetaan 3(-10) minuutin kuluessa. Tällöin taustan tulee olla jo tasaisen vaalea. Heikkokin testiviiva tulkitaan positiiviseksi. Huom! Yli 10 minuutin jälkeen testejä ei enää saa tulkita.

8. Tulokset:

Negatiivinen: Vain kontrolliviiva C.

Positiivinen: Kaksi viivaa C ja T.

Epäonnistunut: Kontrolliviiva C jää ilmestymättä.

