
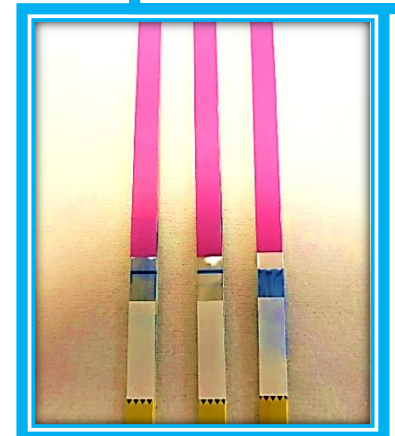


Trypsinogeeni-2 osoitus virtsasta, pikaohje

1. Anna virtsanäytteen ja testiliuskan lämmetä huoneenlämpöiseksi. Pakkauksesta poistetut testitikut on käytettävä viipymättä, sillä ilmankosteus on niille vahingollista.
2. Älä kosketele liuskan kastelualueita sormin. Älä käytä liuskaa, jos sinistä väriä on tulosalueella ennen testausta. Sekoita näyte.
3. Upota testiliuskan kastelualue (alempi, keltainen alue) virtsaan ja pidä sitä siinä, kunnes nestevirta saavuttaa tulosalueen (n. 20 s).
4. Käynnistä sekuntikello. Huom! Liuskaa ei saa kastaa keltaista aluetta syvemmälle. Liuskaa ei saa jättää näytteeseen seiso-
maan.
5. Poista liuska virtsasta ja aseta se vaakasuoraan asentoon.
6. Lue tulos **tasaa 5 minuutin** kuluttua siitä, kun nestevirta on saavuttanut tulosalueen alarajan.

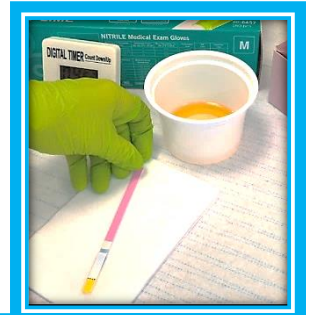

Negatiivinen: Yksi sininen viiva.

Positiivinen: Kaksi sinistä viivaa. Myös heikko testiviiva tulkitaan positiiviseksi.

Epäonnistunut: Ei yhtään sinistä viivaa.