

Päivämäärä


Clinitek Status, pikaohje kontrollinäytteelle

1. Anna kontrollin lämmetä huoneenlämpöön 15–30 min
2. Sekoita putken sisältö perusteellisesti ennen jokaista käyttökertaa kääntelemällä putkea varovasti vähintään 3 minuutin ajan. Ota testiliuska purkista puhtain ja kuivin sormin ja sulje purkki heti.

3. Paina **Strip Test**.
4. Syötä kontrollille näytetunnus.



5. Paina **Start**, ja tee seuraavat toimenpiteet 8 sekunnin aikana:
 - kasta liuska kontrolliputkessa.
 - vedä liuskaa putken reunaa pitkin, jotta ylimääräinen kontrolli valuu pois
 - kuivaa liuskan reuna imupaperia vasten
 - aseta liuska testipöydälle
 - Sulje kontrolliputken korkki ja palauta jääkaappiin välittömästi käytön jälkeen.

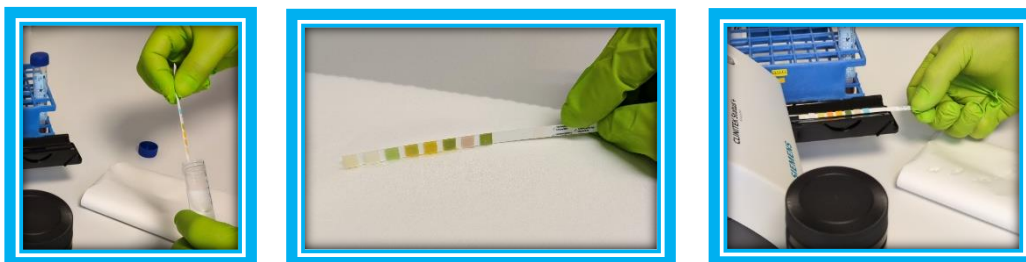

6. Kun määrittäminen on valmis, tulokset näkyvät testiruudulla.
7. Puhdista liuska kostealla liinalla.
8. Paina **Done** tai **Valmis**, kun haluat palata aloitusvalikkoon.
9. Kirjaa tulokset kontrollilomakkeelle.

