

Potilasnäytteen analysointi suomenkielisellä CoaguChek XS Pro- ja Proll -mittarilla – pi- kaohje

1. Anna testiliuskapurkin lämmetä huoneenlämpöön ennen purkin avaamista, jos sitä on säilytetty kylmässä. Sulje purkki välittömästi, kun olet ottanut testiliuskan. Purkista otettu liuska säilyy 10 minuuttia.
2. Vaihda laitteeseen testiliuskaerää vastaava koodisiru. Koodisiru on jokaisessa liuskapurkin laatikossa. Koodisirussa olevan numerosarjan, esim. S_289 pitää olla sama kuin liuskapurkin kyljessä oleva code-numero, esim. 289.
3. Kirjautu mittariin omalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla.
4. Paina **Potilastesti** –painiketta ja **skannaa** potilaan henkilötunnus (vain jos erikseen sovittu) KELA-kortin viivakoodista laitteeseen TAI skannaa viivakoodi potilaan P –INR-HY-tarrasta laitteeseen. **Mikkelin alueella käytetään P-INR-HY –pyynnöstä tulostettua tarraa.**
5. Syötä liuska mittariin.
6. Näytön tiimalasi osoittaa, että liuska lämpenee ja liuskaerän code näkyy näytössä. Tarkista, että liuskapurkin kyljessä on sama numero.
7. Kun näytössä vilkkuu pisaran kuva, näyte tulee lisätä 180 s:n kuluessa. Laite mittaa aikaa 180 s alkaen alaspäin.
8. Lämmitä sormenpää hyvin, **tee pisto** riittävän isolla lansetilla. Älä purista sormenpäätä tarpeettomasti.

Päivämäärä

9. **Ota näyte** ja paina liuska kiinni ihoon **ensimmäisen** veripisaran viereen noin 45 asteen kulmassa. Liu'uta liuskaa pisaran keskustaa kohti pitäen ihokontakti koko ajan. Näyte on lisättävä 15 s:n kuluessa. Irrota liuska ihosta vasta kun laite piippaa.



10. Laite piippaa, kun liuskalla on tarpeeksi näytettä. Näytettä ei voi lisätä eikä liuskaa saa liikuttaa äänimerkin jälkeen. Tiimalasin kuva kertoo laitteen tekevän testiä.
11. Hyväksy tulos painamalla $\checkmark$ ja poista liuska. Tuloksen yhteydessä voi näkyä c-kirjain. c-kirjain tulee näyttöön, jos hematokriitti on erittäin matala ($< 25\%$) tai verinäyte on otettu väärin (esim. märät kädet). Toista mittaus ja varmista, että potilaan kädet ovat kuivat. Mikäli c-kirjain ilmestyy edelleen näyttöön, pyydä potilaalta hematokriitti (B –PVK+T 2474) tai ota suoniverinäyte ja lähetä se laboratorioon analysoitavaksi. Laitteen antamaa tulosta ei saa käyttää, jos laite antaa tulokselle virheilmoituksen.
12. Paina logout. Katkaise virta ja vie laite telakkaan