

Päivämäärä

UUDEN LIUSKAERÄN TESTAUS

Mittaajan nimi	
Toimipiste	
PVM	
Uuden liuskan lot-numero ja CODE-numero	
Mittarin nimi/sarjanumero	

Uuden liuskaerän testaaminen:

Hoitaja ottaa sekä pikamittarinäytteen (mittaa CoaguChekillä) ja suoniverinäytteen (lähettää laboratorioon) vähintään viidestä eri asiakkaasta.

NÄYTENUMERO	Tulos P -INR-HY 50285 (pikamittari)	Tulos INR 4520 (laboratorio)	Ero yksiköissä
1			
2			
3			
4			
5			
keskiarvo			

Suurin sallittu ero hoitoalueella (INR 2-3,5) 0,5

Päivämäärä

Lomake toimitetaan vertailun valmistuttua laboratorioon ja sieltä vastuukemistille hyväksyttäväksi. Vastuukemisti hyväksyy liuskalotin käyttöön.