


Päivämäärä

PIKAOHJE COBAS H 232 -PIKAMITTARILLE


LAITTEEN KÄYNNISTYS

1. Käynnistä laite ON/OFF -painikkeesta.
2. Laite suorittaa laitetestauksen, odota hetki.
3. Laite on käyttövalmis, kun päävalikko ilmestyy näytölle. Tarvittaessa kirjaudu laitteelle.

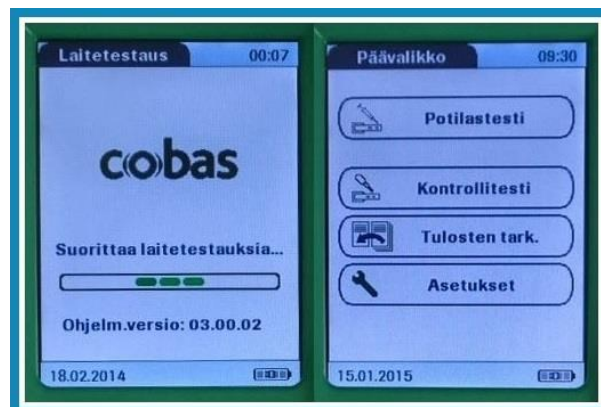



POTILASNÄYTTEEN ANALYSOINTI


1. Aloita näytteen analysointi koskettamalla päävalikon **potilastesti**-painiketta.
2. Laite pyytää syöttämään potilastunnisteen.
3. Syötä potilastunniste numerovalikosta tai paina **Skan.** -painiketta, jonka jälkeen voit lukea putken tarrasta viivakoodin viivakoodinlukijalla (laitteen sivussa tai päässä).
4. Laite pyytää asettamaan testiliuskan testiliuskaohjaimeen. Tarkista testiliuskan päiväys suojaussista.
5. Pitele testiliuskaa näyte- ja testi-alue ylöspäin ja työnnä se vaaka-
tasossa testiliuskaohjaimeen yhdellä tasaisella liikkeellä. (Jos testiliuskaerä vaihtuu, laite pyytää vaihtamaan tässä vaiheessa uuden koodisirun.)

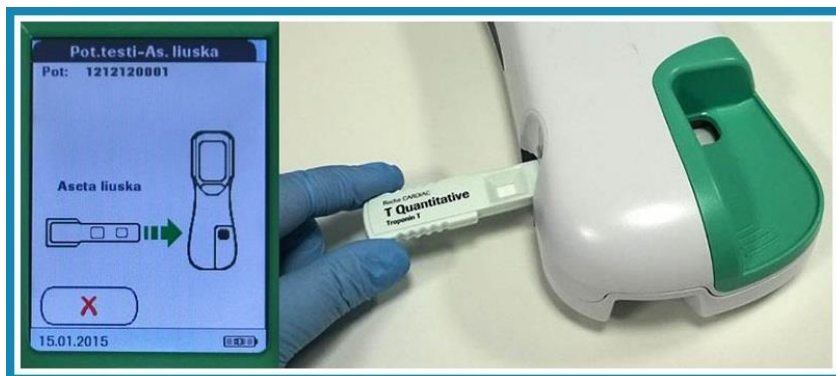


Päivämäärä

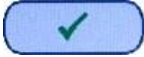6. Laite lämmittää testiliuskan automaattisesti. Odota hetki.
7. Laite pyytää syöttämään näytteen. Näyte tulee syöttää 5 minuutin sisällä.
8. Kääntele geelitöntä litium-hepariini -putkea muutaman keran, jotta näyte sekoittuu.
9. Vedä näyteruiskulla (Roche) verta näyteputkesta merkkiviivaan asti. Näytettä tulee olla tasan 150 µl. Varmista, ettei ruiskussa ole ilmakuplia.
10. Lisää näyte näytteensyöttöaukkoon rauhallisesti välttämällä ilmakuplien muodostumista.
11. Kuittaa näytteen lisääminen  -painikkeella.

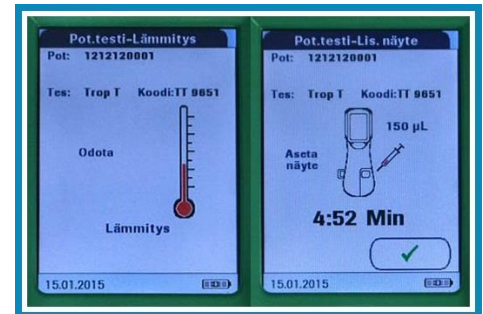

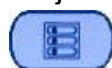12. Laite tarkistaa näytteen ja aloittaa mittauksen.
13. Testitulokset ilmestyvät näytölle ja tallentuu automaattisesti laitteen muistiin. Kirjaa tulos.
14. Kirjattuasi tuloksen, paina  painiketta.

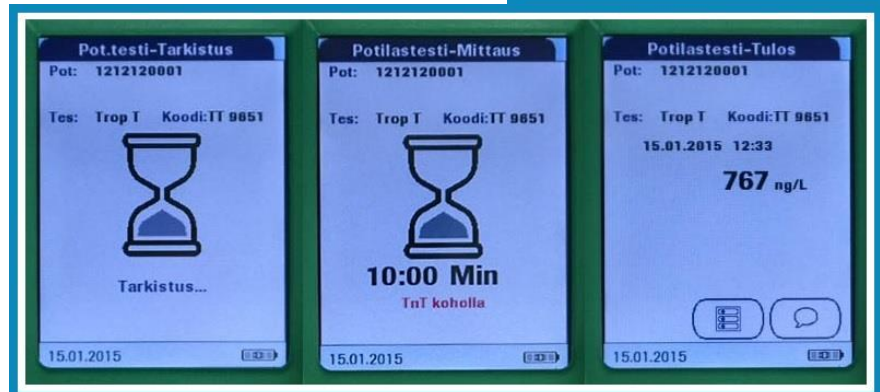

15. Laite pyytää poistamaan testiliuskan. Poista testiliuska laitteesta.
16. Hävitä käytetty testiliuska.
17. Laite palaa päävalikkoon ja voit analysoida uuden näytteen tai sulkea laitteen ON/OFF -painikkeella.

