

11.3.2025

AFINION HBA1C, KONTROLLILOMAKE

Kontrollien eränummerot

Kontrollien tavoitearvot

Kontrolli I:

Kontrolli I:

Kontrolli II:

Kontrolli II:

[illegible]

- Kontrollit tehdään kerran viikossa ja aina testikasettierän vaihtuessa.
- Mitatun kontrollin tulee olla hyväksytyissä rajoissa (katso tavoitearvot paketista). Mikäli saamasi tulos on tavoitearvoista poikkeava, uusi kontrolli uudesta pullosta. Potilasnäytteitä ei analysoida ennen kuin kontrollit ovat ok.
- Vaihda kontrollilomake kontrollierän vaihtuessa ja kirjaa ylös uudet eränumerot ja kontrollien tavoitearvot (kontrollipaketista).