

11.3.2025

PIKAOHJE AFINION 2 -PIKAMITTARILLE, HbA1c potilasnäyte

✓ testikasettien on oltava huoneenlämpöisiä (CRP-kasetit säilyvät 4 viikkoa huoneenlämmössä)

✓ kirjaa paketin kylkeen tai kasettiin päivämäärä, jolloin kasetit on otettu huoneenlämpöön



POTILASNÄYTTEEN ANALYSOINTI

1. Älä avaa kantta käsin, kansi avautuu painamalla näytössä

1. Avaa testikasetin suojaussi juuri ennen käyttöä.

2. Jos näyte otetaan sormenpäältä, pyyhi 1. pisara pois ja ota näyte 2. pisarasta.

3. Näytteen analysointi pitää aloittaa 1 min kuluessa kapillaarin täyttämisestä.

4. Varmista, että kapillaari on täyttynyt päähän asti, vältä ilmakuplien muodostumista. ÄLÄ PYYHI KAPILLAARIA!

5. Laita kasetti laitteeseen minuutin kuluessa kapillaarin täyttämisestä.

6. Aseta testikasetti laitteeseen ja sulje luukku.

7. Syötä potilaan näytenumero, nimi tai henkilötunnus ja vahvista painamalla

8. Tulos tulee ruudulle testin valmistuttua (3½ min). Hyväksy tulos painamalla



9. Poista kasetti ja SULJE KANSI, kansi ei saa jäädä auki.

10. Vastaa tulos välittömästi käytössä olevaan potilastietojärjestelmään. Tuloksesta on käytävä ilmi, että tulos on saatu pikamittarilla.

