

24.3.2025

PIKAOHJE CARE-FILL KAPILLAARIN KÄYTTÖ EPOC-LAITTEELLA


1. Testin tekoon tarvitset:

- ✓ Näytteenottovälineet
- ✓ kapillaarin
- ✓ laitteen
- ✓ testikasetin.




2. Kapillaarin osat:

- ✓ valkoinen suodatin
- ✓ sovitin
- ✓ sininen nauha
- ✓ mäntä.

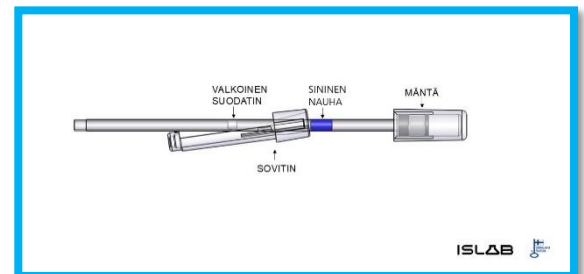

3. Aloita näytteenotto vasta kun EPOC:n näytössä lukee: Aseta näyte. Tee ihopisto näytteenotto-ohjeen mukaisesti.

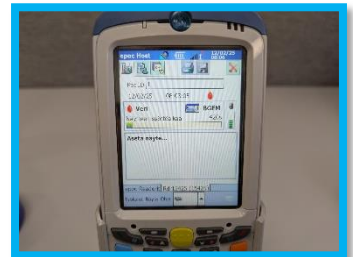

4. Pitele kapillaarista kiinni sinisen nauhan kohdalta. Älä irrota, siirrä tai paina mäntää, äläkä pidä siitä kiinni. Sovitinta ei saa irrottaa, mutta sen paikkaa voi muuttaa.
5. Pidä kapillaariputkea vaakasuorassa pistokohtaa kohti ja kosketa veripisaraa. Anna kapillaarin täyttyä, kunnes veri osuu valkoiseen suodattimeen.



24.3.2025

6. Kun kapillaari on täynnä, pidä kapillaaria sinisen nauhan kohdalta niin, että kapillaariputken kärki osoittaa ylöspäin. Liuta sovitinta kapillaarin kärkeä kohti ja aseta kapillaarin kärki sovittimeen. Kiinnitä sovitin kapillaariputkeen työntämällä kapillaariputkea varovasti sovittimeen, kunnes se on kiinni sovitimessa.



7. Kiinnitä kapillaarin kärki testikortin syvennykseen painamalla kapillaaria kevyesti alaspäin ja pyöryttämällä kapillaaria.
8. Paina mäntää kevyesti koko ajan alaspäin toisella kädellä tasaisesti jarruttaen ja keskeytymättä. Laite piippaa ja näyttöön tulee teksti "Näytettä analysoidaan". Poista kapillaari.

