

Muutos virtsan bakteeriviljelytutkimuksiin: Uricult Trio -viljelyalusta korvaa Orientation-maljan Siun soten alueella.

Tutkimus / Tutkimukset

[U -Bakteeri, viljely](#)

[U -BaktVi \(1155\)](#)

Aihe

Mikäli U -BaktVi näytettä ei saada kuljetetuksi tutkivaan laboratorioon 24 h kuluessa, käytetään Uricult-levyä.

Uricult-levy kastetaan molemmiin puoliin tuoreeseen virtsanäytteeseen, ylimääräisen virtsan annetaan valua pois. Kasteltu Uricult-levy laitetaan takaisin suoja-putkeen, korkki suljetaan tiiviisti. Levy säilytetään ja kuljetetaan tutkivaan laboratorioon huoneenlämmössä. Uricult-näytteestä vastauksia annetaan viljelytutkimuksen edistymisen mukaisesti.

Huom. Uricultia käytetään vain, kun näytteen kuljetus laboratorioon viivästyy yli 24 h näytteen ottamisesta, muuten käytetään normaalisti säilöntäaineputkia.

ISLABin lähilaboratorioista saa Uricult-levyjä ja tarkempaa ohjeistusta Uricultin käyttöön.

Säilytys

Uricult-levyt säilytetään huoneenlämmössä

Jari Karhukorpi, yl
Mikrobiologian osasto
P-Karjalan aluelaboratorio
044 717 8900

Maarit Anttilainen, apul.osh
lähilaboratoriot
P-Karjala
044 717 8647

Piia Mertanen, apul.osh
lähilaboratoriot
P-Karjala
044 717 8650

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
ISLABin osastonhoitajat
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset
Internet, intranet
OA_NÄYTOT, OA_LOGIST, OA_MIKROB, OA_ERTANA