

Näytteiden pakkaaminen putkipostikapse-  
liin, ohje KYSille

19.5.2025

1.2.246.10.21261066.100.0.2025.2.8.1

**Näytteitä lähetetään vain sinisissä kapseleissa.** Putkipostin halkaisija 16 cm. Muita kapseleita ei saa käyttää näytteiden lähetykseen. **Näytteet tai näyteastiapaketit asetetaan huolellisesti kuplamuovitaskuun.** Pussi kääritään pitkittäissuunnassa löyhästi rullalle taskun läpän avulla (kapselin pituinen kääri) ja asetetaan kapseliin.



**Alla** on tarkempia **erityisohjeita** tiettyjen näyteastioiden pakkaamisesta ennen kuplamuovitaskuun laittamista. **Kaikki muut näyteastiat voidaan laittaa samaan kuplamuovitaskuun sellaisenaan.** **Älä laita kapseliin ylimääräisiä tyhjiä kuplamuovipusseja, pusseja tai geelejä.** Näyteastiat eivät tarvitse lisäpehmustetta.

**Lähetysosoite 24/7: 1200 ISLAB näytteiden vastaanotto**

|                                                                                 |                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Avonäytteenä vakuumputkeen otetut verinäytteet tai punktionesteet</b></p> | <p>Varmista korkin kiinnipysyminen, kääri astia selluun ja laita Minigrip- tai vastaavaan, tiiviisti sulkeutuvaan pussiin. Sulje pussi huolellisesti.</p> |  |
| <p><b>Verikaasuruiskut</b></p>                                                  | <p>Pakkaa ruiskut jääkaappikylmään kylmägeelitaskuun (tilaus keskusvarastosta koodi: 431934, GEELITASKU 180X100X20MM KIRJEKUORIMALLI).</p>                |  |
| <p><b>Hengitystienäytteet ja muut UTM-RT-putkeen otetut näytteet</b></p>        | <p>Sulje korkki huolellisesti ja pakkaa putket yksittäin salpapussiin imeyttäjän kanssa. Sulje salpapussi huolellisesti.</p>                              |  |

**Putkipostilla ei saa lähettää**

Kts. ohjeistus sivulta 2.

Näytteiden pakkaaminen putkipostikapse-  
liin, ohje KYSille

19.5.2025

1.2.246.10.21261066.100.0.2025.2.8.1

**Putkipostilla ei saa lähettää**

- B -TrVeADP (KL20990) B-Trombosyytit, ADP-vaste VerifyNow-laitteella
- B -TromTo (KL50080) B -Trombosyyttien toimintatutkimus PFA-laitteella
- B -NIPTtri (KL6373) B -Sikiön trisomiatutkimus äidin verinäytteestä
- Lasisia erikoisputkia, esim. CPT-putkia
- Tutkimushankkeiden erikoisputkia (mm. BCT-putket)
- Eriyisen infektioriskin näytteitä (SARS-, MERS-, lintuinfluenssa-, antrax- tms. → oma toiminta-ohje)
- Anaerobiliemiputkia (TIO, FAB)
- Portagerm anaerobiampulleja
- Sienirikastusliemiputkia (SABORAUD)
- Muita kierrekorkillisia näytepurkkeja (esim. uloste- ja yskösnäytepurkit)
- Viljelymaljoja
- Ruiskussa olevia punktionesteitä
- Verivalmisteita hoitoyksiköstä toiseen tai palautuksina verikeskukseen. Ne on kuljetettava itse tai esim. lähetin toimesta. Ainoastaan verikeskus saa lähettää verivalmisteita. Kts. erillinen ohje verivalmisteiden lähetyksestä.
- Ainutkertaisia näytteitä lähettäjän harkinnan mukaan