

Hengitystienäytteiden lähettäminen putkipostilla KYSiltä ISLABin päivystyslaboratorioon**Aihe**

ISLABin putkipostiohjeistusta on päivitetty. 19.5.2025 alkaen uuden käytännön mukaisesti putkipostilla voidaan lähettää myös hengitystienäytteitä ja muita UTM-RT-viruskuljetusputkeen otettuja näytteitä KYSin osastoilta ja päivystyspoliklinikalta ISLABin päivystyslaboratorioon.

Näyte ja pakkaaminen

Putkipostilähetystä varten UTM-RT-viruskuljetusputkeen otetut hengitystienäytteet (esimerkiksi -RcomNhO, -RMikNhO ja -CV19Ag) ja muut näytteet (esimerkiksi -HSVNhO ja -VZVNhO -rakkulanäytteet) pakataan yksittäin salpapussiin imeytystyynyn tai -liinan kanssa. Salpapussi suljetaan huolellisesti. Pussit asetetaan huolellisesti kuplamuovitaskuun. Kuplamuovitasku kääritään pitkittäissuunnassa löyhästi rullalle ja asetetaan kapseliin.

Anna Oksaharju
sairalamikrobiologi
Pohjois-Savon aluelaboratorio

Johanna Miettinen
sairalakemisti
Pohjois-Savon aluelaboratorio

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
ISLABin osastonhoitajat
Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaalat
Internet, intranet
OA_LOGIST, OA_MIKROB.