

Tutkimus	Putki/näyteastia	Huomioitavaa
U -BaktVi (1155) U -UFSeul (sisältää U -Solut + U -BaktVi)	 4 ml ja 10 ml säilöntä- aineputki	Täyttö vähintään merkkiviivaan. Sekoitus 8-10 kertaa. Säilyy 24h huoneenlämmössä, U -UFSeul yön yli säilytys +4 °C.
U -BaktEVi (1787)	 4 ml säilöntäaineputki	Täyttö vähintään merkkiviivaan. Sekoitus 8-10 kertaa. Säilyy 24h huoneenlämmössä.
U -KemSeul (1881) U -Solut (1940)	 10 ml säilöntäaineputki (jos näytettä saadaan alle 7 ml, voi poikkeustapauk- sissa käyttää 4 ml säilöntä- aineputkea)	Täyttö vähintään merkkiviivaan. Sekoitus 8-10 kertaa. U -Solut säilyy 24h huoneenläm- mössä, yön yli säilytys +4 °C. U-Kemseul säilyy 2 vrk huoneen- lämmössä ja 3 vrk +4 °C.
U -AlbKre (4511), U -Amyl (1080), U -Prot (2519), U -Osmol (2444), U -PneuAg (54205), U -LepnAg (4632)	 4 ml säilöntäaineeton putki	Säilytys +4 °C, katso näytteen- otto- ja säilyvyysohjeet tutkimus- ohjekirjasta.
cU- ja dU-alkuiset keräysvirtsat	 3000 ml keräysastia	Säilytys +4 °C, katso tutkimus- kohtaiset ohjeet tutkimusohjekir- jasta.
U -CtGcNhO (4816)	 Aptima® Urine Specimen Collection Kit (näytekulje- tusputkessa keltainen tarra)	Täyttö merkkiviivojen väliin. Säilyy 1 kk +2 - +30 °C.
-TbVi (2812)	 50 ml tehdaspuhdas purkki	Säilytys +4 °C, katso näytteen- otto- ja säilyvyysohjeet tutkimus- ohjekirjasta.