

ISLABin lisalmen ja Varkauden laboratoriosta siirretään punktionesteiden ja virtsan solujen analytiikkaa KYS Puijon sairaalan päivystyslaboratorioon**Tutkimus / Tutkimukset**

1940 U -Solut
2055 Sy-Kide-O
2650 Af-Solut
2651 As-Solut
2655 Li-Solut
2657 Pf-Solut
2658 Sy-Solut
4355 Pd-Solut

Aihe

ISLABin lisalmen ja Varkauden laboratoriosta siirretään 3.11.2025 alkaen edellä mainitut virtsa- ja punktionestetutkimukset tehtäväksi KYS Puijon sairaalan laboratoriossa. lisalmesta ja Varkaudesta on arkipäivisin Puijon päivystyslaboratorioon kaksi kuljetusta, joiden lähtöajat ovat lisalmesta klo: 9:00 ja 14:00 ja Varkaudesta klo: 10:40 ja 14:00. Muutosajankohdan jälkeen likvorin solut -näytteitä (Li-Solut 2658) ei voi ottaa enää lisalmessa eikä Varkauudessa, koska näyte ei säily riittävän pitkään kuljetuksessa. Muiden punktionesteiden solunäytteet säilyvät 6 tuntia EDTA-putkessa, joten ko. näytteitä voi ottaa lisalmessa ja Varkauudessa arkipäivisin klo 13 saakka. Virtsan solunäytteiden (U -Solut 1940) säilyvyysaika on 1 vuorokausi ja nivelnesteiden kidenäytteiden (Sy-Kide-O 2055) säilyvyysaika 3 vuorokautta.

Näyte

Punktionesteiden solunäytteet tulisi ottaa paremman säilyvyyden vuoksi aina EDTA-putkeen (K2EDTA 3/5 ml). Sy-Kide-O-näyte otetaan geelittömään li-hepariiniputkeen ja U -Solut-näyte 10 ml C&S-säilöntä-aineputkeen.

Katariina Vuorenmaa	Johanna Miettinen	Jarkko Romppanen	Pentti Mäntymaa
Aluelaboratorion johtaja	Sairaalakemisti	Osastonylilääkäri	Osastonylilääkäri
Pohjois-Savon			
aluelaboratorio			

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
ISLABin osastonhoitajat
Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset
Internet, intranet
OA_ERTANA, OA_HEMAUT