

fB-NH₄-ion -tutkimuksen (1070) laite ja viitearvot muuttuvat Iisalmen ja Varkauden laboratorioissa 10.11.2025

Tutkimus / Tutkimukset

fB-Ammonium-ioni

fB-NH₄-ion (1040)

Aihe

fB-Ammonium-ionin (fB-NH₄-ion, 1070) laite ja viitearvot muuttuvat Iisalmen ja Varkauden sairaalassa 10.11.2025. Viitearvot muuttuvat samoiksi kuin plasman fP-NH₄-ion-tutkimuksen viitearvot: 0-50 umol/l.

Viitearvot

Uusi viitearvo: 0-50 umol/l.

Näyte

3 ml:n EDTA-putki. Näyte otetaan ilman staasia EDTA-putkeen. Näyte sekoitetaan, asetetaan kylmän geelipussin sisään ja tuodaan välittömästi laboratorioon määritettäväksi. Tutkimus pitää suorittaa 20-30 minuutin sisällä näytteenotosta.

Säilytys

Näyte säilyy jäähdytettynä n. 20 minuuttia.

Jarkko Romppanen
Osastonylilääkäri
Pohjois-Savon aluelaboratorio

Kukka Pakarinen
sairaalakemisti
Pohjois-Savon aluelaboratorio

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat
ISLABin osastonhoitajat
Iisalmen ja Varkauden sairaalat
Internet, intranet
OA_VIEANA, OA_KEMAUT