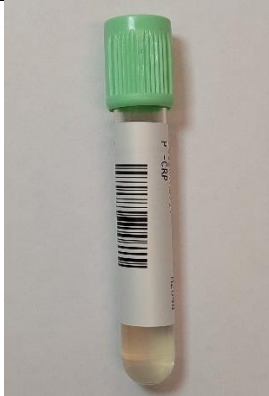
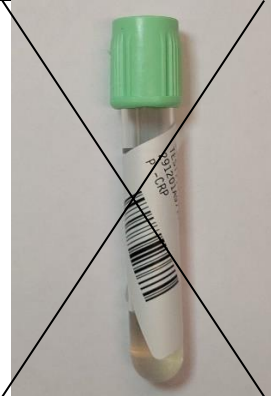

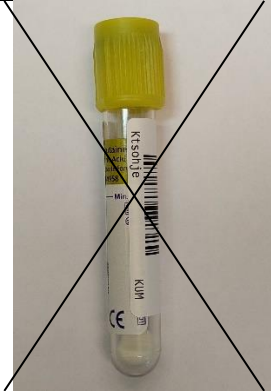
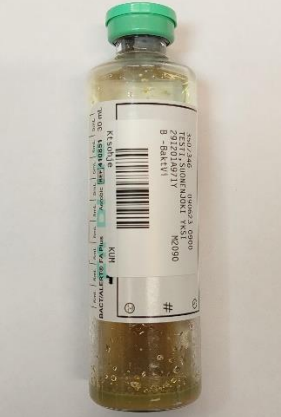



Tarran liimaaminen näyteastiaan (verinäyteputket, virtsanäyteputket, veriviljelypullot)

| Oikein  | Väärin  | Ohjeet   |
|---|---|--|
|    |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yksi tarra per putki.</li> <li>- Älä liimaa tarroja näyteastiaan päällekkäin.</li> </ul> <p>Liimaa tarra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pitkittäin kohtisuoraan</li> <li>- mahdollisimman lähelle korkkia, niin päin, että viivakoodi on tarran yläosassa.</li> <li>- tasaisesti siten, ettei jää ilmakuplia eikä tarra jää ryttyyn</li> </ul> |
|   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jätä "ikkuna" näyteputkeen, josta voidaan arvioida näytteen laatu ja määrä.</li> <li>- Etiketilliset putket: liimaa potilastarra suoraan näyteputken tarran päälle.</li> <li>- Älä tee merkintöjä viivakoodiin.</li> </ul>  |
|  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veriviljelypulloissa liimaa tarra pitkittäin kohtisuoraan henkilötiedoille varatulle alueelle</li> <li>- Älä peitä tarralla pullossa olevia viivakoodeja</li> </ul>   |