

30.1.2026

PIKAOHJE, POTILASNÄYTTEEN ANALYSOINTI EPOC -LAITTEELLA

- ✓ Testikortit säilytetään huoneenlämmössä (15–30°C), kortteja ei saa säilyttää jääkaapissa
- ✓ Kortit eivät saa altistua voimakkailla iskuille
- ✓ Korttipussi avataan vasta juuri ennen näytteen analysointia
- ✓ Näytteenä käytetään tuoretta, verikaasuruiskuun otettua kokoverta (vena/arteria)
- ✓ Pidä Reader tasaisella pinnalla ja vältä sen liikuttelua analysoinnin aikana.

1. Kytke virta Readeriin, Hostiin ja tulostimeen



2. Kirjautu laitteelle (Host) skannaamalla käyttäjätunnus.
3. Odota, että Host ja Reader yhdistetään pariiksi.



4. "Aloita testi asettamalla testikortti". Aseta testikortti ripeällä ja tasaisella liikkeellä.



5. Reader aloittaa kortin tarkistuksen ja kalibroinnin. **ÄLÄ ASETA NÄYTETTÄ!**
6. Kirjaa Pot. ID-kohtaan potilaan tunniste joko skannaamalla tai kirjoittamalla. Näppäimistön saat näytön oikeasta alareunasta.



30.1.2026


7. Ota näyte.

8. Kun kalibrointi on valmis, laite antaa äänimerkin ja näyttöön tulee teksti: ”**Aseta näyte ...**”. Aikaa 7,5 min.

9. Pidä **hyvin sekoitettu** ruisku pystyasennossa ja kohtisuorassa asennossa kasettiin nähden. Tiputa ruiskusta yksi pisara pois ennen näytteen lisäämistä testikortille.
10. Kiinnitä ruisku testikortissa olevaan syvennykseen kevyesti painamalla
11. Paina ruiskun mäntää kevyesti ja tasaisesti. Laite piippaa ja näyttöön tulee teksti ”**Näytettä analysoidaan**”. Poista ruisku.



12. Analysointi kestää noin 30 sekuntia. Tulokset tulevat ruudulle. Verikaasu-tulokset näkyvät omalla välilehdellään ja kemialliset ja metaboliset tulokset omallaan.
13. Tuloksen voi tulostaa paperille painamalla tulostusnäppäintä.
14. Kirjaa tulokset.

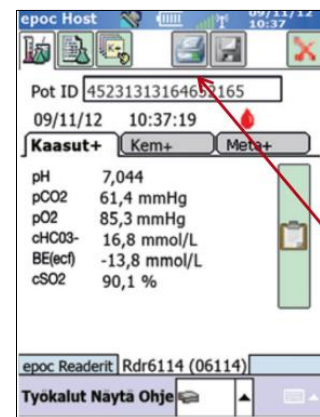

15. Kun testin merkkivalo vilkkuu vihreänä, poista kasetti vetämällä se tasaisesti pois. Hävitä sekajätteisiin.

Aikaisemmin tehtyjä tuloksia voidaan tarkastella painamalla näytön alaosassa Reader-kuvaketta ja valitse ponnahdusikkunasta: Näytä testi. Viimeisin tulos on aina ylimmäisenä. Pidä haluttua tulosta painettuna ja valitse: ”Näytä tämä testi” jos haluat katsella tuloksia tai ”Tulosta tämä testi” jos haluat tulostaa.