

PIKAOHJE, KONTROLLINÄYTTEEN ANALYSOINTI EPOC HOST -LAITTEELLA

- ✓ Testikortit säilytetään huoneenlämmössä (15–30°C), kortteja ei saa säilyttää jääkaapissa.
- ✓ Kortit eivät saa altistua voimakkaille iskuille.
- ✓ Korttipussi avataan vasta juuri ennen näytteen analysointia.
- ✓ Pidä Reader tasaisella pinnalla ja vältä sen liikuttelua analysoinnin aikana.
- ✓ **Ota kontrolli huoneenlämpöön vähintään tunti ennen analysointia!!**

1. Kirjaudu laitteelle (Host) skannaamalla käyttäjätunnus.

2. Paina Reader-kuvaketta muutama sekunti, näyttöön tulee alasveto-valikko.



3. Valitse: **Testaa QA**



4. Skannaaja kontrollin eränumero ISLABin toimittamasta paperista tai kirjaa se käsin.

5. Laitteen pyytäessä, aseta testikortti ripeällä ja tasaisella liikkeellä.

6. Reader aloittaa kortin tarkistuksen ja kalibroinnin. **ÄLÄ ASETA NÄYTETTÄ!**

7. Kun laite pyytää asettamaan näytteen, käsittele kontrollinäyte seuraavasti:

- a. Ravistele ampullia juuri ennen käyttöä **voimakkaasti vähintään 15 s ajan**.
- b. Pyörittele ampullia varoen, jotta liuos palaa ampullin pohjalle. Anna mahdollisten kuplien nousta ylös ennen ampullin avaamista.
- c. Suojaa sormet, katkaise ampullin kaula värillisen täplän vastakkaiselta puolelta.

8. Ota kontrollinäyte ruiskuun neulan avulla. Pudota muutama tippa hukkaan ennen testikortille lisäämistä.

9. Lisää kontrollinäyte testikortille kuten potilasnäyte.

10. Merkitse tulokset lomakkeelle.