


PIKAOHJE, KONTROLLINÄYTTEEN ANALYSOINTI EPOC NXS HOST -LAITTEELLA

- ✓ Testikortit säilytetään huoneenlämmössä (15 – 30°C), kortteja ei saa säilyttää jääkaapissa
- ✓ Kortit eivät saa altistua voimakkaille iskuille
- ✓ Korttipussi avataan vasta juuri ennen näytteen analysointia
- ✓ Pidä Reader tasaisella pinnalla ja vältä sen liikuttelua analysoinnin aikana.
- ✓ **Ota kontrolli huoneenlämpöön vähintään tunti ennen analysointia!!**

1. Kirjaudu laitteelle (Host) skannaamalla käyttäjätunnus.

2. Peruuta testi painamalla **X** näytön vasemmasta yläkulmasta

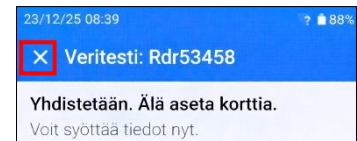

3. Valitse **QA-testaus** → **Testaa QA**

4. Valitse Reader ja paina

ALOITA TESTAUS

5. Skannaava kontrollin eränumero ISLABin toimittamasta paperista tai kirjaa se käsin

6. Laitteen pyytäessä, aseta testikortti riipeällä ja tasaisella liikkeellä.



7. Reader aloittaa kortin tarkistuksen ja kalibroinnin. **ÄLÄ ASETA NÄYTETTÄ!**

8. Kun laite pyytää asettamaan näytteen, käsittele kontrollinäyte seuraavasti:

- a. Ravistele ampullia juuri ennen käyttöä **voimakkaasti vähintään 15 s ajan.**
- b. Pyörittele ampullia varoen, jotta liuos palaa ampullin pohjalle. Anna mahdollisten kuplien nousta ylös ennen ampullin avaamista.
- c. Suojaa sormet, katkaise ampullin kaula värillisen täplän vastakkaiselta puolelta.



9. Ota kontrollinäyte ruiskuun neulan avulla. Pudota muutama tippa hukkaan ennen testikortille lisäämistä.

10. Lisää kontrollinäyte testikortille kuten potilasnäyte.

11. Merkitse tulokset lomakkeelle.