



21.1.2026

Kontrollin analysointi cobas h 232 -laitteella, pikaohje

1. Kirjaudu sisään laitteeseen, jos kirjautuminen vaaditaan.
2. Valitse päävalikosta: **Kontrollitesti**.
3. Aseta testiliuska.
4. Jos laite ilmoittaa väärästä koodisirusta, ota siru pois ja aseta oikea koodisiru testipakkauksesta.





5. Valitse näytöltä kontrollin koodi (löytyy kontrollipullostasta). Jos kontrollierä on uusi, valitse **Uusi** ja aseta kontrollipaketissa oleva siru laitteeseen.
6. Valitse, teetkö kontrollitason 1 vai 2.

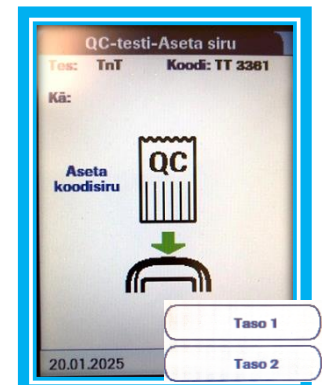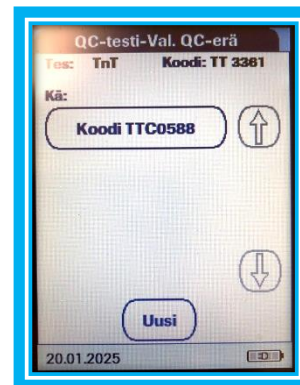

7. Annostele 150 ul kontrollia liuskalle (aikaa 5 min) ja paina . Analysointi kestää noin 9-12 min.

8. Tulokset tulevat ruudulle, esim:

Pass: 332 ng/l
(320/160–480 ng/l)

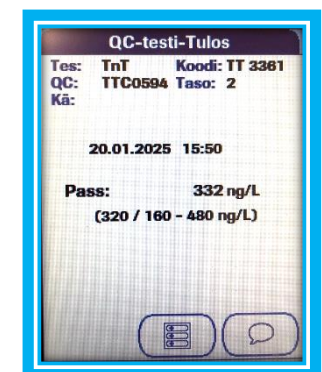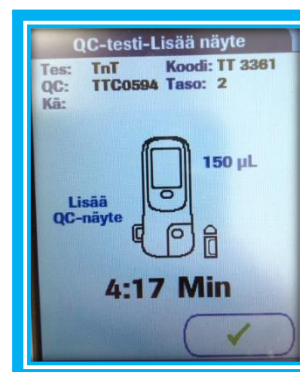

- ✓ Pass: tulos on ok.
- ✓ 320 ng/l on kontrollin tavoite.
- ✓ Tuloksen tulee olla välillä 160–480 ng/l.
- ✓ Kirjaa tulokset laitepäiväkirjaan.

Jos tuloksen yhteydessä lukee: Fail, tulos ei ole ok, katso ohjeet työhjeesta.