


21.1.2026

## PIKAOHJE IQC-kontrolliliuskojen analysointiin

- ✓ IQC kontrolliliuskat analysoidaan laitteen optiikan toimivuuden testaamiseksi (päivittäin kun potilasnäytteitä)
- ✓ Säilytä IQC-liuskat huoneenlämmössä, säilyvät avattuna 6 kk. Merkitse avauspäivä purkkiin.
- ✓ Uuden purkin avauksen yhteydessä laite saattaa pyytää purkin mukana tulevaa sirua.

### LAITTEEN KÄYNNISTYS

1. Käynnistä laite ON/OFF -painikkeesta.
2. Laite suorittaa laitetestauksen, odota hetki.
3. Laite on käyttövalmis, kun päävalikko ilmestyy näytölle. Tarvittaessa kirjaudu laitteelle.

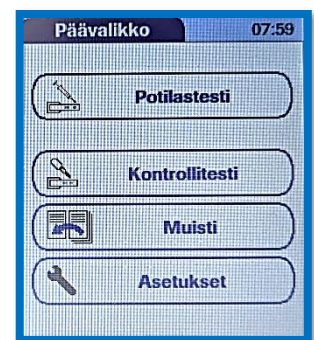

### IQC-LIUSKOJEN ANALYSOINTI

1. Valitse näytöstä: Kontrollitesti.
2. Mittaa ensin Low-liuska (*Taso 1*).
3. Ota IQC liuska purkista, sulje purkki.
4. Työnnä IQC-liuska laitteeseen tasaisella liikkeellä.
5. Mittaus alkaa ja tulos ilmestyy muutamassa sekunnissa.
6. Mittaa High-liuska (*Taso 2*).



### 7. Tulokset:

- ✓ **"PASS"** laite toimintakunnossa.
- ✓ **"FAIL"** IQC-testi antaa aiheen epäillä laitteen toimivuutta.

Laitetta ei voi käyttää potilastesteihin. Ota yhteys vierituskimushoitajiin [savo.vieritestit@islab.fi](mailto:savo.vieritestit@islab.fi) tai [pk.vieritestit@islab.fi](mailto:pk.vieritestit@islab.fi)

8. Merkitse tulokset laitepäiväkirjaan (+/-).

