



Vakuumiverinäytteenotto Vacutainer Eclipse Signal (BD) turvaneulalla (kuvat ohjeessa BD:n luvalla) Työohje  
5.3.2026


1. Poista ohjaimen suojakalvo. Neula on heti käyttövalmis.

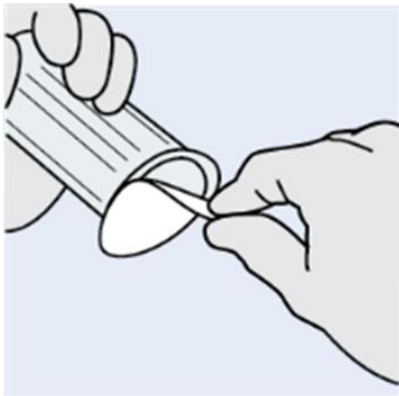


2. Käännä neulan vaaleanpunainen turvasuojus ohjainta vasten. Neulan kärjen aukko ja leikkauspinta ovat vaaleanpunaisen turvasuojuksen kanssa samansuuntaiset. Neula on valmiiksi oikeassa asennossa verinäytteenottoa varten. Älä kierrä tai pyöritä turvasuojusta. Poista neulan vihreä suoja kiertämällä ja laita se roskiin.

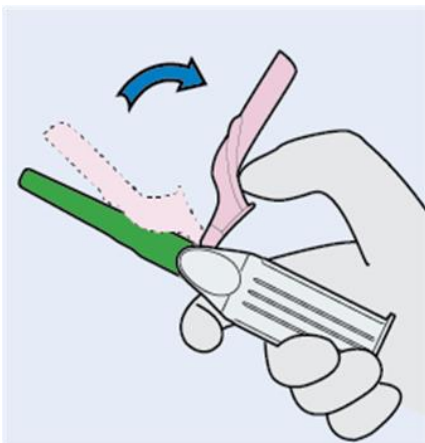

3. Vangitse suoni sormella pistokohdan alapuolelta ja vie neula suoneen n. 5- 30° kulmassa suonen suuntaisesti. Neulan kammioon tuleva veri näyttää sen, että neula sijaitsee laskimossa oikein.

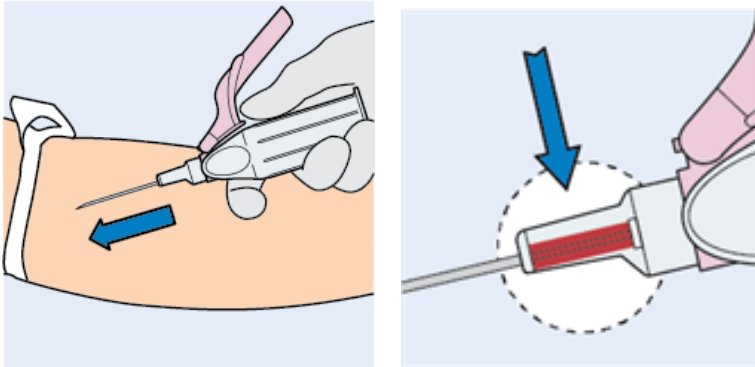

4. Vie putki ohjaimen. Älä kierrä putkea ohjaimen sisällä.
5. Kun olet ottanut kaikki näytteet, poista neula laskimosta. Paina pistokohtaa tufferilla. Aktivoi turvamekanismi välittömästi painamalla peukalollasi turvasuojus neulan päälle. Suojus napsahtaa lukittuessaan. Älä aktivoi turvasuojusta painamalla sitä kovaa alustaa vasten.

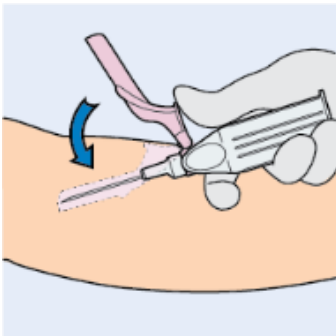

6. Laita käytetty turvaneula ja ohjain välittömästi pistävälle jätteelle tarkoitettuun riskijätetiaan organisaatiosi ohjeiden mukaisesti.

