


27.4.2026

Kontrollinäytteen analysointi HemoCue 201+ Hb-mittarilla, pikaohje

- ✓ Kontrollilla tarkistetaan, että mittari ja testikyvetit toimivat oikein.
- ✓ Tarkasta kontrollien tekotiheys työohjeesta.
- ✓ Avattu pullo säily huoneenlämmössä 30 vrk.
- ✓ Kirjaa avaamispäivä pullon kylkeen.
- ✓ Kontrollin tulee olla huoneenlämpöinen.



1. Avaa kyvettipidike laitteen etuosasta ja käynnistä laite virtanapista.
2. Pidä molempia mittarin painikkeita painettuina, kunnes näytöllä vilkkuu QC.
3. Valitse kontrollinäytteen analysointi painamalla vasemmanpuoleista näppäintä (ruutuun tulee QC ja kolme viivaa).

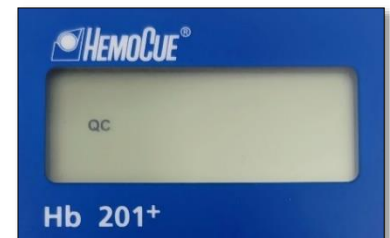

4. Juuri ennen käyttöä, sekoita kontrollia varovasti käsin vähintään 30 s.
5. Avaa korkki varovasti.
6. Hylkää ensimmäinen kontrolliliuostippa.
7. Tipauta yksi tippa kontrollia vettä hylkivälle pinnalle ja käytä se heti mittaukseen.
8. Poista mahdolliset kontrolliliuoksen jäämät korkista puhtaalla liinalla ja sulje korkki huolellisesti.
9. Pistä kyvetin kärki ylhäältä päin, suorassa asennossa kontrollipisaraan ja anna kyvetin täytyä kerralla tarpeeksi pitkään, ettei ilmakuplia tulisi kyvetin sisään. Jos kyvetti jää vajaaksi, ota näyte uuteen kyvettiin.
10. Pyyhkäise ylimääräinen kontrolli varovasti pois kyvetin ulkopinnoilta. Varmista, että kontrollia ei imeydy pois kyvetin avoimesta päästä.
11. Aseta kyvetti kyvettipidikkeeseen ja työnnä kyvetti mittausasentoon.
12. Kirjaa tulokset kontrollitaulukkoon (liite 2), kontrollin tavoitteet löytyvät pakkausinsertin taulukosta, yksikkö on g/l, mean=tavoite ja range=tavoiteväli, jonka sisällä tuloksen pitäisi olla.

