

Сбор мочи для анализа в домашних условиях

Исследования: U-KemSeul (1881), U-SOLUT (1940), U-BaktVi (1155), U-BaktEVi (1787).

Принадлежности для взятия анализа

- Контейнер для сбора мочи
- Пробирки для образца (1–3 шт.)

Крышка контейнера открывается поворотом. Не прикасайтесь к внутренней поверхности контейнера и крышки. Под защитной наклейкой на крышке контейнера находится острая игла для переноса образца.

Не открывайте крышки пробирок.

Храните принадлежности для взятия анализа в недоступном для детей месте.

Подготовка к сбору анализа


Соберите мочу не ранее чем через 4 часа после предыдущего мочеиспускания. Если с момента последнего мочеиспускания прошло менее 4 часов, укажите это время на последней странице данной инструкции.

Сбор образца мочи

1. Тщательно вымойте руки.
2. Откройте крышку контейнера и положите ее внутренней стороной вверх на чистую поверхность.
3. **Женщины:** раздвиньте половые губы.
Мужчины: отодвиньте крайнюю плоть назад.
4. Подмойтесь теплой водой без использования мыла или других моющих средств. Аккуратно промокните туалетной бумагой.
5. Начните мочиться в унитаз.
6. Не прерывая мочеиспускание, подставьте контейнер под струю мочи. Наполните контейнер примерно наполовину.
7. Закончите мочеиспускание в унитаз.

Перенос образца мочи в пробирку

1. Поставьте контейнер с мочой на стол и плотно закрутите крышку.
2. Снимите защитную наклейку с крышки контейнера. Под ней находится отверстие с иглой для переноса образца.
3. Вставьте пробирку крышкой вперед в отверстие.
4. Надавите на пробирку вниз. Она начнет заполняться мочой. Удерживайте пробирку на месте, пока она не наполнится.
5. Когда пробирка наполнится, извлеките ее, потянув вверх. Поверните пробирку горлышком вверх и убедитесь, что уровень пробы достигает как минимум минимальной отметки на пробирке.
6. Перемешайте образец, перевернув пробирку вверх дном и обратно 8–10 раз.

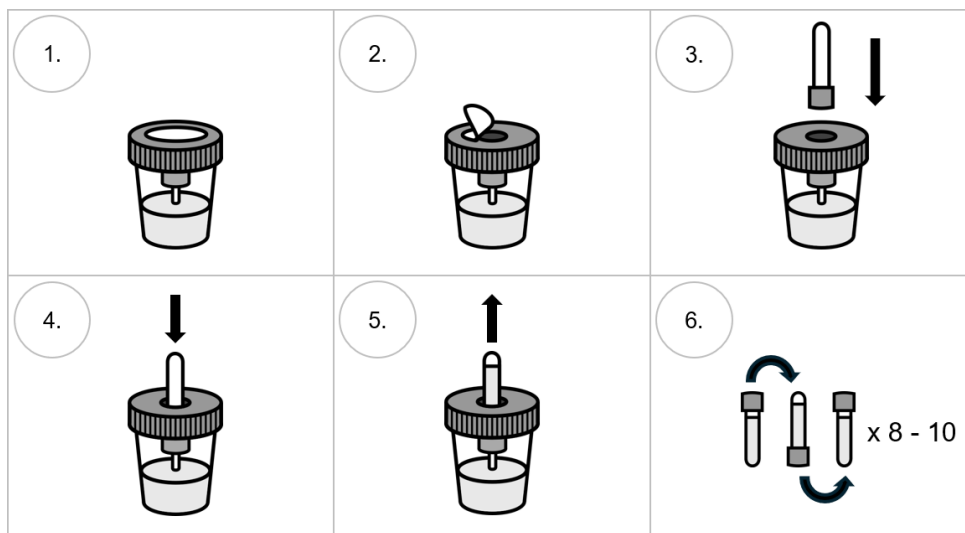

- Заполните все полученные пробирки одинаковым образом.
- Оставшуюся мочу вылейте в унитаз. Закройте крышку контейнера и выбросьте его в контейнер для смешанных отходов.
- Заполните необходимые сведения на последней странице инструкции и вложите этот лист в пакет с пробирками. Как можно скорее доставьте пробирки в лабораторию. До доставки храните их при комнатной температуре.

Если вы не смогли выполнить эти инструкции или получили другие рекомендации, обязательно сообщите об этом перед сдачей анализа берущему анализ специалисту.

Если у вас возникли вопросы по поводу сдачи анализов, вы можете обратиться в консультационную службу ISLAB по телефону 044 457 0740.

На вопросы, касающиеся обследований или результатов анализов, ответит ваш лечащий врач или медсестра.

Сведения об образце

Заполните эту страницу и верните ее вместе с образцами.

Напишите ваши имя и фамилию:

Напишите свой личный идентификационный номер (henkilötunnus):

Напишите свой номер телефона:

Укажите время взятия пробы (дата и время):

При необходимости предоставьте дополнительную информацию: