

20.8.2026

Muutoksia verikaasuruiskuissa

Aihe

ISLAB on kilpailuttanut terveydenhuollon näytteenottotarvikkeita, ja sen tuloksena verikaasuruiskuihin tulee tuotemuutoksia. Muutokset astuvat voimaan vaiheittain 1.9.2026 alkaen koko ISLABin toiminta-alueella.

Käytöstä poistuva tuote:

safePICO Aspirator (ref 956-622), Arterial Blood Sampler, Radiometer, toimittaja Triolab

Vaiheittain 1.9.2026 alkaen käyttöön tulevat tuotteet:


Line Draw, Arterial Blood Sampling Syringe, Smiths Medical, toimittaja Steripolar

safePICO A, Aspirating blood syringe, Radiometer, toimittaja Triolab

Pro-Vent, Arterial Blood Gas Sampling Kit, Smiths Medical, toimittaja Steripolar

Kooste tuotteista:

Tuote	Ref	täyttötapa	ruiskun tilavuus	vähimmäisnäytemäärä
Line Draw	4043E	aspiroitava	3 ml	1 ml
safePICO A	957-204	aspiroitava	1 ml	0,7 ml
Pro-Vent	4616E	painenäyttöinen	1 ml	0,3 ml

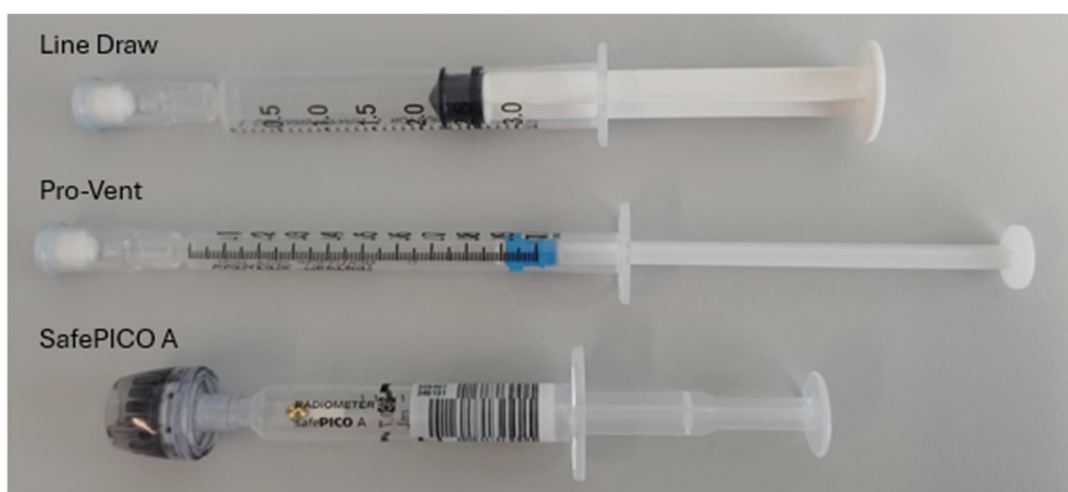

20.8.2026

Tilaus- ja toimituskäytänteissä ei tule muutoksia, ellei yksikköänne erikseen tiedoteta.

Näytteen käsittelyssä pyydämme huomioimaan seuraavat asiat:

- Tunnista potilas ja tarkista, että pyyntö on oikea. Varmista, että sinulla on oikean potilaan pyyntötarra.
- Poista ilma ruiskusta välittömästi näytteenoton jälkeen ja täytä suodatinkorkki verellä.
- Sekoita näyte välittömästi kääntelemällä ruiskua ylösalaisin ja pyörittämällä kämmenten välissä vähintään 10 sekunnin ajan.
- Näytteet analysoidaan välittömästi tai toimitetaan jääkaappikylmän geelitaskun välissä laboratorioon analysoitavaksi mahdollisimman pian.

Näytteenotto-ohjeita löytyy ISLABin internetsivuilta: [Näytteiden ottaminen » Islab](#)

Maija Lehtikangas
sairaalakemisti

Ulla Härkönen
vs. preanalytiikan
vastuualuejohtaja

Päivi Ylikangas
johtava ylilääkäri

Jakelu

ISLABin aluelaboratorioiden johtajat

ISLABin osastonhoitajat

Pohjois-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Etelä-Savon hyvinvointialueen sairaalat ja terveyskeskukset

Internet, intranet

OA_NÄYTÖT, OA_VIEANA