

22.10.2025

PIKAOHJE AFINION 2 -PIKAMITTARILLE, HbA1C kontrollinäyte

- ✓ Kontrollit säilytetään jääkaapissa (2–8 °C) ja säilyvät avaamattomina pullon kylkeen merkittyy viimeiseen käyttöpäivään asti.
- ✓ Avatut kontrollipullot säilyvät 60 päivää jääkaapissa (2–8 °C), merkitse avauspäivämäärä pulloon.
- ✓ Säilytä pulloja aina pystyasennossa.
- ✓ Anna kontrollien lämmetä huoneenlämpötilaan ennen käyttöä, noin 45 min.



KONTROLLINÄYTTEEN ANALYSOINTI


1. Lämmitä kontrolli huoneenlämpöiseksi, tasapainottuminen kestää noin 45 min.
2. Sekoita kontrolli hyvin ravistamalla pulloa 30 s.
3. Avaa kansi painamalla sinistä kontrollikuvaketta .
4. Avaa testikasettipussi ja ota kontrollipullosta näyte kapillaariin, varmista, että kapillaari on täyttynyt päähän asti ja siinä ei ole ilmakuplia.
5. Aseta kasetti laitteeseen (viivakoodi on vasemmalla) ja sulje kansi käsin.
6. Paina  ja syötä kontrollin numero (1 tai 2), vahvista painamalla .



22.10.2025

7. Vahvista tulos painamalla näytöllä 
8. Poista kasetti ja SULJE KANSI, kantta ei saa jättää auki.
9. Tarkista kontrollin tulos kontrollipaketin sisällä olevasta taulukosta. Huomioi, että tavoite vaihtuu, kun kontrollin lot vaihtuu. Kirjaa tulokset kontrollilomakkeeseen (liite 1).

HbA1c-tuloksen yksikkö on mmol/mol ja tuloksen pitää olla suluissa ilmoitetun tavoitealueen sisällä (alla olevassa kuvassa kontrolli 1:n tavoite on 43 ja tavoitealue 37–50).

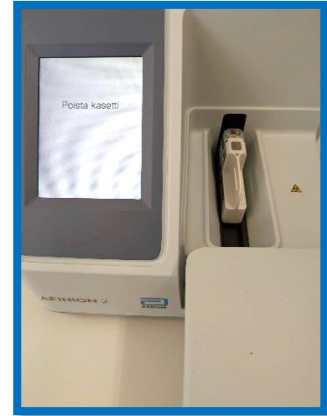

AFINION™ HbA1c CONTROL

REF 1116793



1116912 Rev. A 2019/02

CONTROL CI



102196470112983105450167

CONTROL CII



102196310122982054200148

LOT

10219647

10219631

mmol/mol

43 (37 - 50)

69 (60 - 79)

% HbA1c

6.1 (5.5 - 6.7)

8.5 (7.6 - 9.4)